


myPhonak●

Uživatelská příručka – myPhonak 7

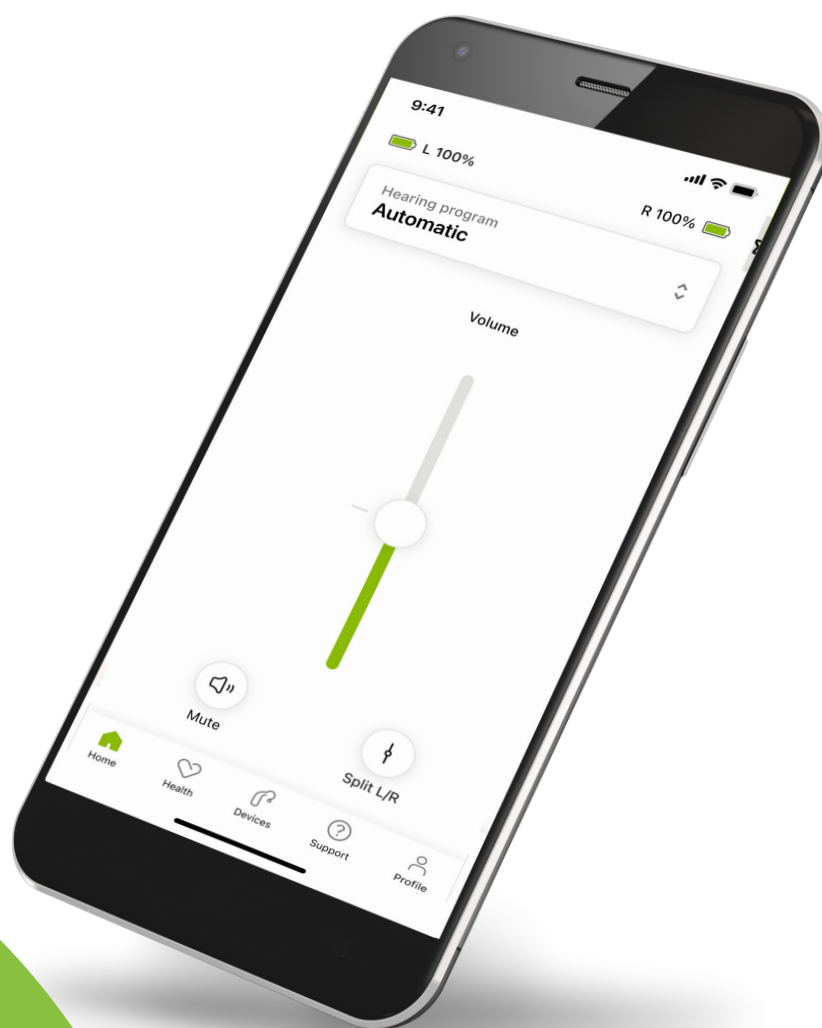

Začínáme

myPhonak je aplikace vyvinutá společností Sonova, světovou jedničkou v oboru poslechových řešení se sídlem ve švýcarském Curychu. Tato uživatelská příručka popisuje funkce aplikace, které mohou ovládat uživatelé.

-  Než začnete aplikaci používat, tuto uživatelskou příručku si důkladně přečtěte, abyste plně využili všechny funkce, které aplikace nabízí.
-  Pro používání aplikace není nutný žádný nácvik.



Informace o kompatibilitě:

Pro použití aplikace myPhonak je nezbytná konektivita sluchadel Phonak s Bluetooth®.

- Aplikaci myPhonak lze používat v telefonech s technologií Bluetooth® Low Energy (LE) s operačním systémem iOS® verze 15 nebo novější.
- Aplikaci myPhonak lze používat v zařízeních se systémem Android™, certifikovaných pro službu Google Mobile Services (GMS), která podporují Bluetooth® 4.2 a Android OS 8.0 a jejich novější verze.

Slovní ochranná známka Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek je v rámci licence společnosti Sonova AG.

iPhone je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích.

Android je ochranná známka společnosti Google LLC.

IOS® je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. a/nebo jejich přidružených společností ve Spojených státech amerických a některých dalších zemích.

Obsah

Stručný přehled	4
Instalace aplikace myPhonak	5
Nastavení a správa účtu s aplikací myPhonak	6
Párování se sluchadly Phonak	7
Řešení problémů: Párování	8
Domů: Náhled dálkového ovládání	9
Domů: Pokročilé nastavení dálkového ovládání	10
Domů: Náhled dálkového ovládání* — nestandardní funkce	12
Domů: Pokročilé nastavení dálkového ovládání — vytvoření nového nebo aktualizace stávajícího programu*	14
Řešení problémů: Pokročilé nastavení dálkového ovládání	15
Zařízení	17
Aktualizace	19
Relace podpory a Vzdálené podpory	21
Zahájení relace Vzdálené podpory	24
Řešení problémů: Relace Vzdálené podpory	25
Sledování zdravotních údajů v sekci Zdraví: Nastavení	27
Panel nástrojů v sekci Zdraví	28
Podrobný přehled funkcí aplikace Zdraví: Doba nošení, počet kroků, úroveň aktivity*, vzdálenost, kterou jste ušli a uběhli	29
Podrobný přehled funkcí aplikace Zdraví: Tepová frekvence* a kalorie* spálené chůzí a během*	31
Aplikace Zdraví: Ostatní funkce*	33
Důležité bezpečnostní informace	35
Údaje o splnění předpisů	37
Vysvětlivky k použitým symbolům	38

Stručný přehled

Dálkové ovládání




Vzdálená podpora



*Pouze pro dobíjecí sluchadla.

Instalace aplikace myPhonak

1. Připojte svůj chytrý telefon k internetu prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilních dat.
2. Na svém chytrém telefonu zapněte Bluetooth®.
3. Stáhněte aplikaci myPhonak z obchodu a nainstalujte ji do svého telefonu.
4. Otevřete aplikaci.
5. Při prvním použití aplikace můžete spustit prohlídku.
Pokud ji nechcete spustit, klepněte na tlačítko **Přeskočit prohlídku**.

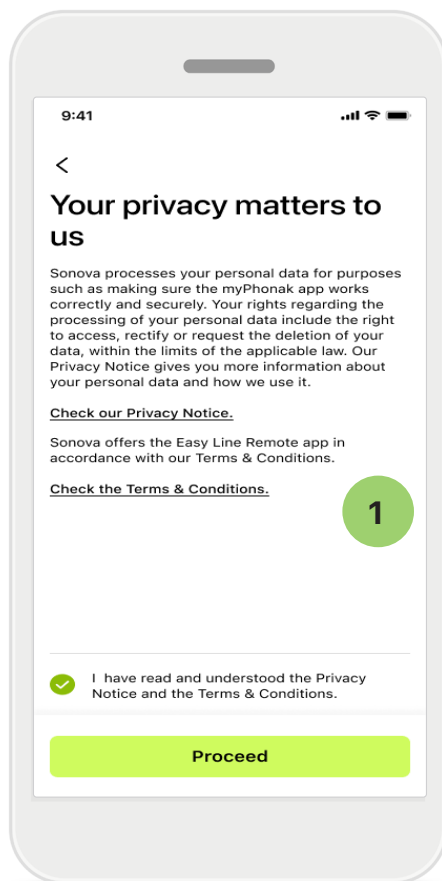

- 1 Zásady ochrany osobních údajů**
Chcete-li aplikaci používat, po přečtení Prohlášení o ochraně osobních údajů a Smluvních podmínek zaškrtněte příslušné políčko. Pak klepněte na tlačítko **Pokračovat**.



Vylepšování produktu

Můžete sdílet údaje o používání a zdravotní údaje, abychom mohli vylepšovat naše produkty. S vašimi údaji nakládáme tak, jak je to popsáno v Prohlášení o ochraně osobních údajů, a nebude vás možné zpětně identifikovat.

Nastavení a správa účtu s aplikací my-Phonak

- Můžete si vytvořit účet, abyste měli přístup k dalším funkcím zaměřeným na zdraví. Pro úpravu nastavení vašich sluchadel účet není nutný.
- Účet si můžete vytvořit pomocí identifikačních údajů svého e-mailu nebo čísla mobilního telefonu.
- Pokud již účet máte, klepněte na tlačítko **Přihlášení**.
- Chcete-li tuto část přeskočit, klepněte na ikonu .

Home

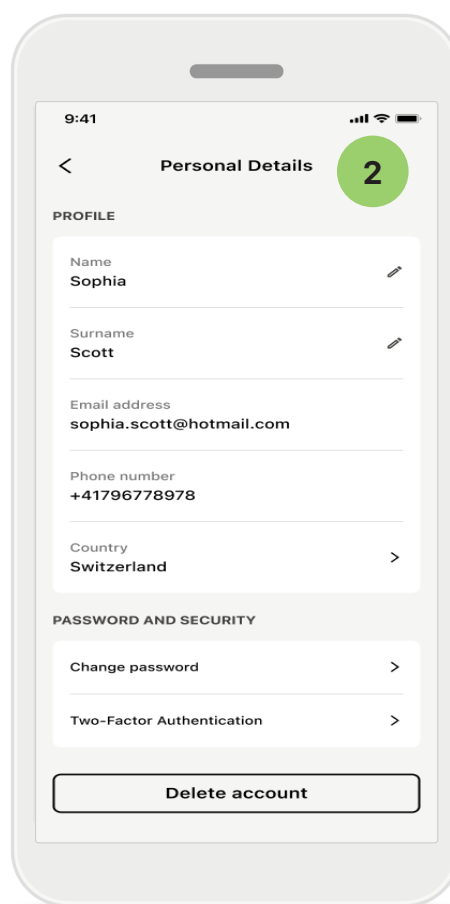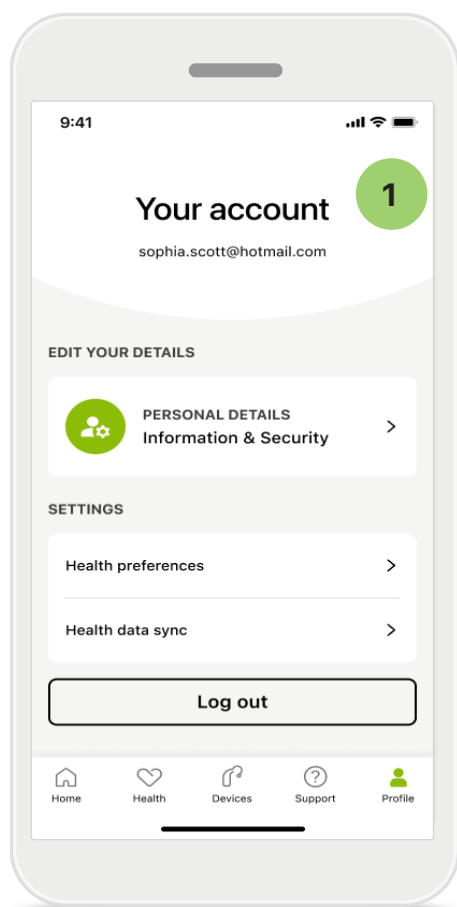

1 Sekce Profil

Na obrazovce Profil můžete upravit informace o svém profilu a nastavit preference pro aplikaci Zdraví.

Chcete-li se z aplikace odhlásit, klepněte na tlačítko **Odhlásit**.

2 Osobní údaje


Své osobní údaje můžete upravit na obrazovce Osobní údaje a změnit informace týkající se zabezpečení.

Chcete-li účet smazat, klepněte na tlačítko **Smazat účet**. Tuto akci je nutné potvrdit zadáním svého hesla.

Párování se sluchadly Phonak

Chcete-li propojit sluchadla s povolenou funkcí Bluetooth® s aplikací myPhonak, postupujte podle pokynů níže.

- Klepněte na tlačítko **Můžeme začít**.

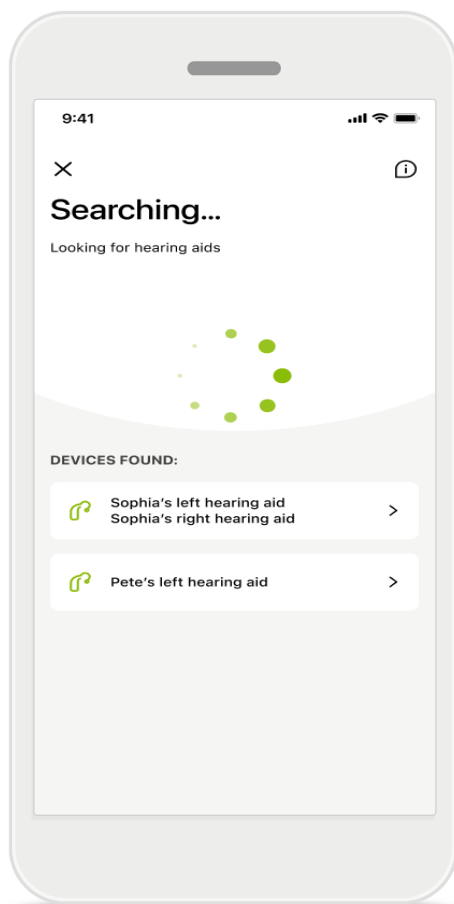

Probíhá vyhledávání


Aplikace vyhledá kompatibilní sluchadla. Může to trvat několik sekund. Poté se zobrazí výsledky. Klepněte na zařízení, které chcete připojit.

Aplikace se připojí ke každému ze sluchadel samostatně.

U zařízení se systémem iOS potvrďte spárování klepnutím na tlačítko **Párovat** ve vyskakovacím okně pro každé zařízení zvlášť.

Další funkce:

- Sluchadla můžete po úspěšném spárování používat pro telefonické hovory a streamování hudby. Chcete-li toto další párování přeskočit, klepněte na tlačítko **Pokračovat**.

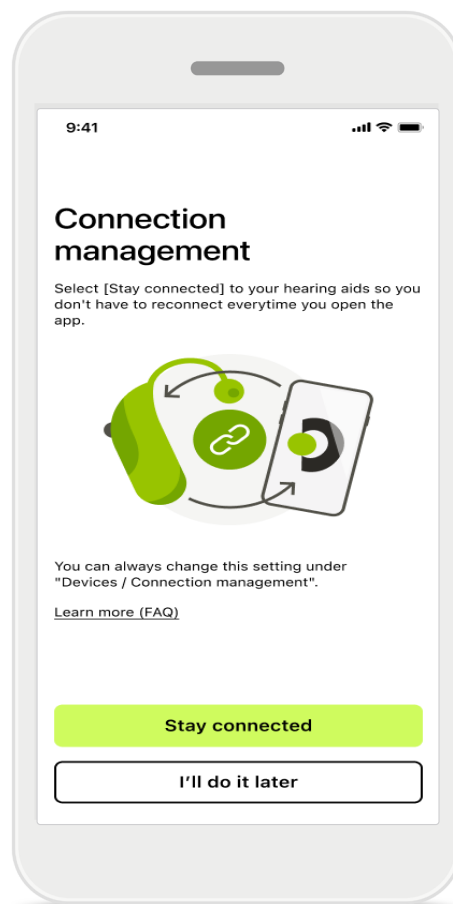

Správa připojení

Svá sluchadla můžete nechat připojená k aplikaci myPhonak, abyste je nemuseli pokaždé znovu připojovat. Klepnutím na tlačítko **Neodpojovat** toto nastavení aktivujete.




Pokud sluchadla nereagují, zkontrolujte, jestli nejste mimo rozsah, nebo zda jsou zapnutá a že baterie není vybitá. Pokud se nacházíte v dosahu rušivých polí, vzdalte se od nich.

Řešení problémů: Párování

Možné chyby během postupu nastavení


Další informace o řešení problémů naleznete na internetové stránce podpory značky Phonak na <https://www.phonak.com/myphonakapp>

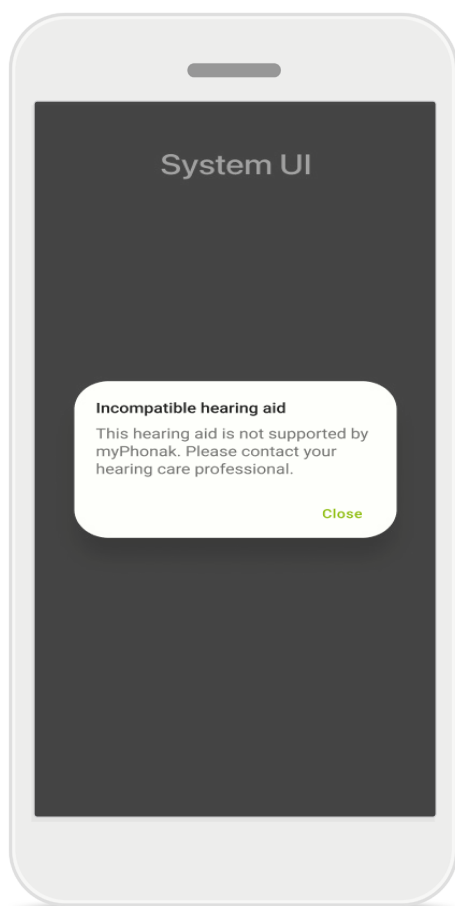

Nekompatibilní zařízení

Aplikace se nemůže připojit ke sluchadlům, protože nejsou kompatibilní.

Další informace získáte u poskytovatele sluchadel.

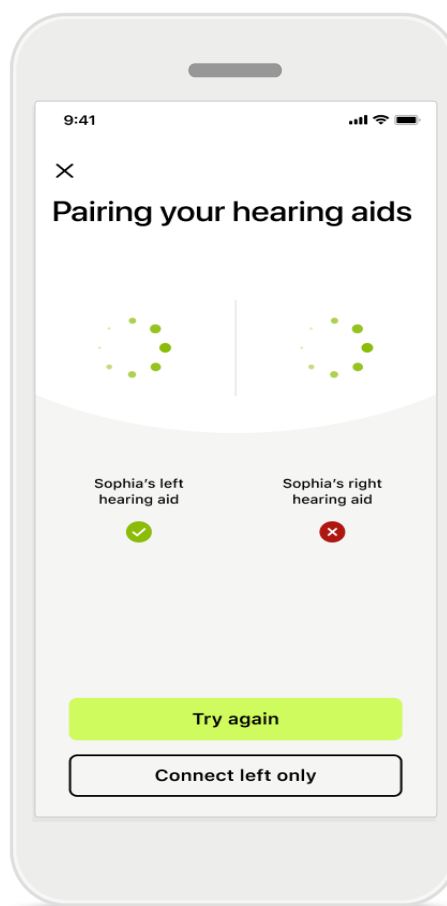

Chyba připojení sluchadla


Pokud se spárování s jedním ze sluchadel nezdaří, klepnutím na možnost **Zkusit znovu** opět spustíte párování.

Připojení selhalo u obou sluchadel

Klepněte na možnost **Zkusit znovu** a restartujte postup párování. Dále postupujte podle pokynů.


U zařízení s OS Android musíte při prvním párování zařízení s Bluetooth® povolit Služby určování polohy. Po úvodním nastavení lze Služby určování polohy znovu zakázat.

Domů: Náhled dálkového ovládání

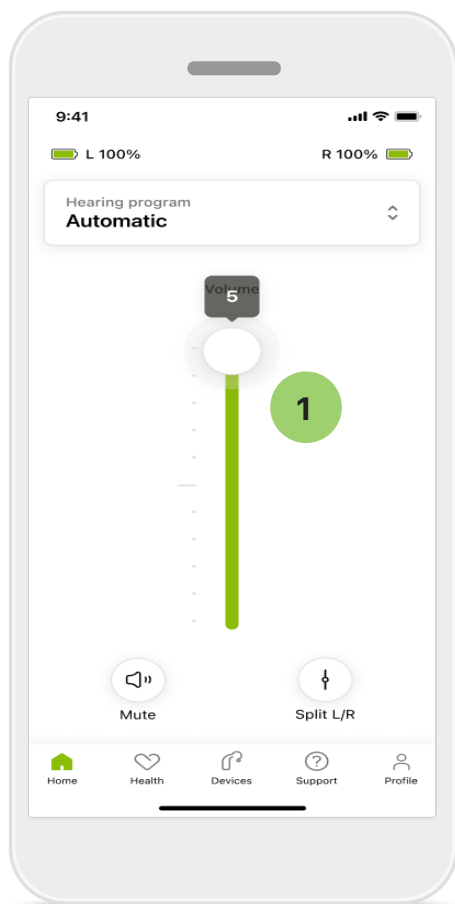

1 Nastavení hlasitosti sluchadla

Přemístěním posuvníku nahoru zvýšíte hlasitost. Chcete-li hlasitost snížit, přemístěte posuvník dolů. Máte-li dvě sluchadla, tento posuvník ovládá obě zařízení zároveň.

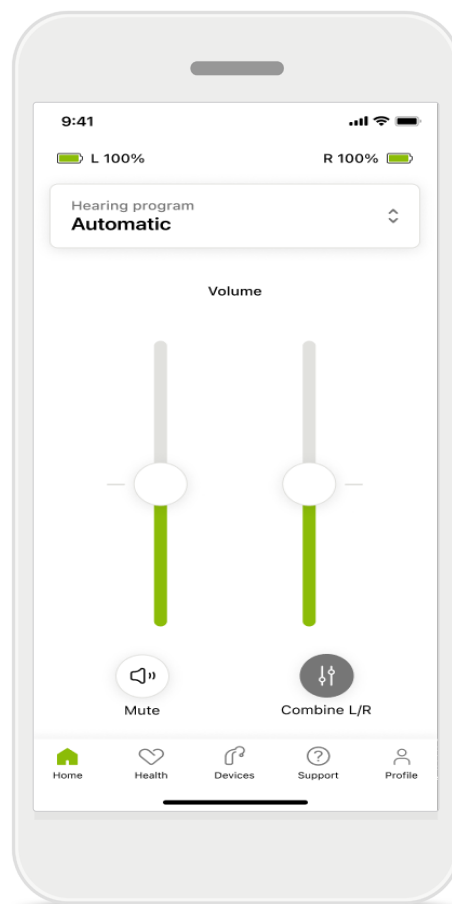

Rozdělení hlasitosti


Chcete-li rozdělit hlasitost, kliknutím na ikonu  **Rozdělit** nastavte každé sluchadlo samostatně, nebo se vraťte do hlavního nastavení. Chcete-li zvuk svého sluchadla ztlumit nebo ztlumení zrušit, klepněte na ikonu  **Ztlumit**.

Zvukové programy jsou dostupné přímo v horní části domovské obrazovky aplikace. Potáhněte prstem na karuselu a klepnutím vyberte program, který vyhovuje vašim potřebám.


Možnosti výběru:

-  Automatický program
-  Programy vytvořené poskytovatelem sluchadel
-  Programy, které jste vytvořili sami

Domů: Pokročilé nastavení dálkového ovládání

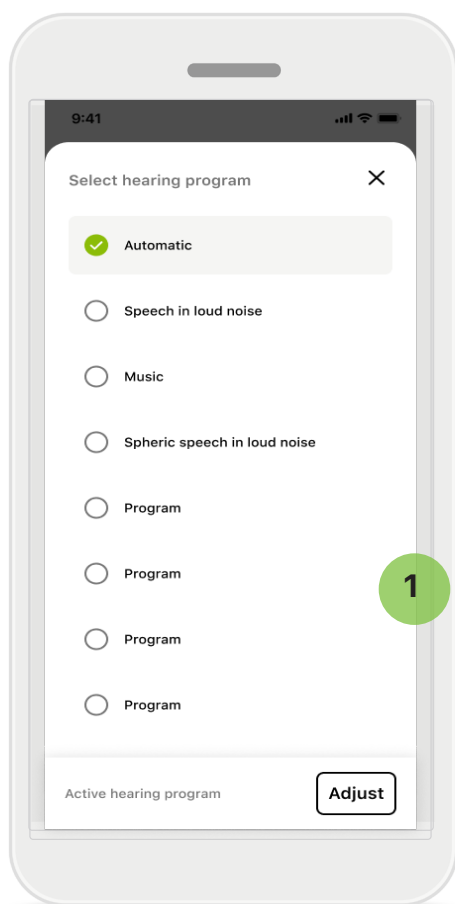


- 1 Nastavit program**
Klepnutím na možnost **Nastavit program** můžete upravit vybraný program pomocí pokročilého nastavení zvuku.

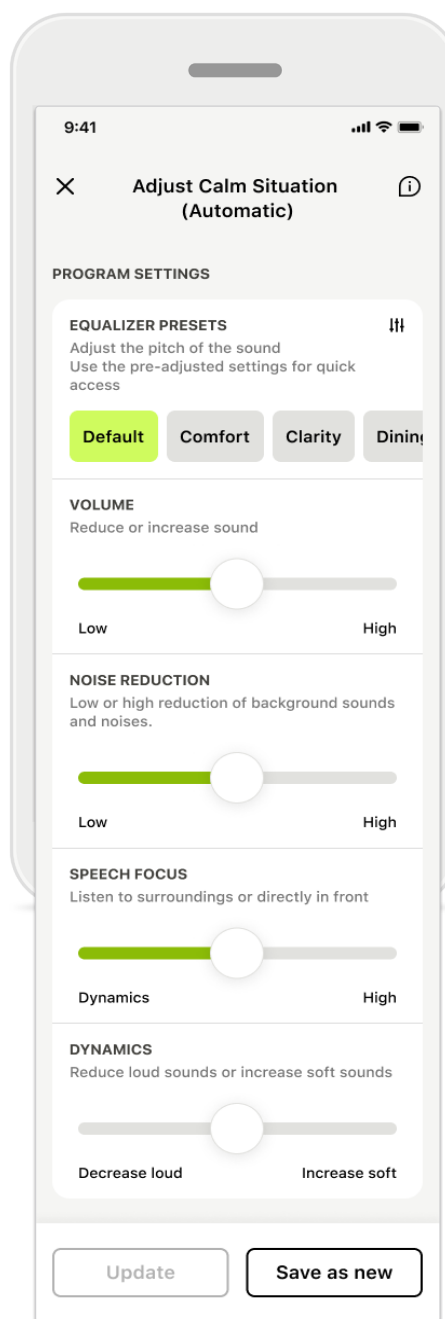

Nastavení programu

Vybraný program můžete nastavit různými způsoby. Pomocí posuvníků můžete upravit jednotlivá nastavení: předvolby ekvalizéru, ovládání hlasitosti, snížení hluku, zaměření na řeč a ovládání dynamiky.


Domů: Pokročilé nastavení dálkového ovládání

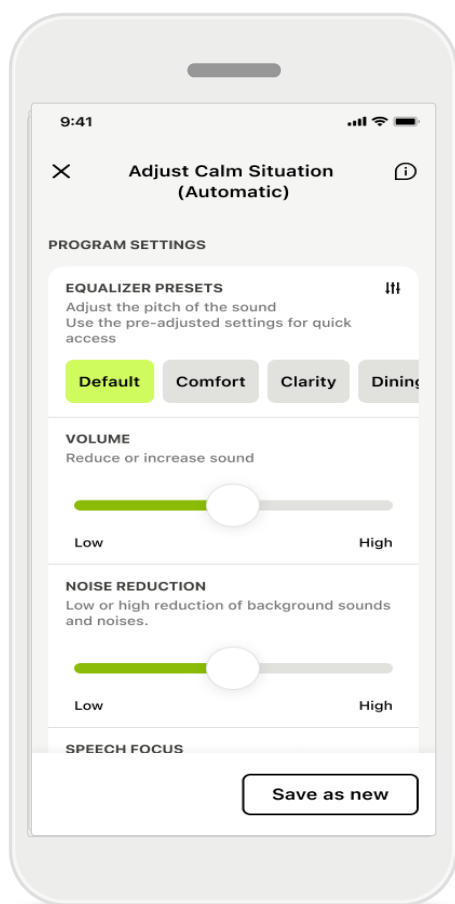

Předvolby ekvalizéru

Předvolby ekvalizéru umožňují provádění rychlého nastavení výšky zvuku podle akustického prostředí, v němž se nacházíte.

Po klepnutí na ikonu ekvalizéru můžete provést další pokročilá nastavení.

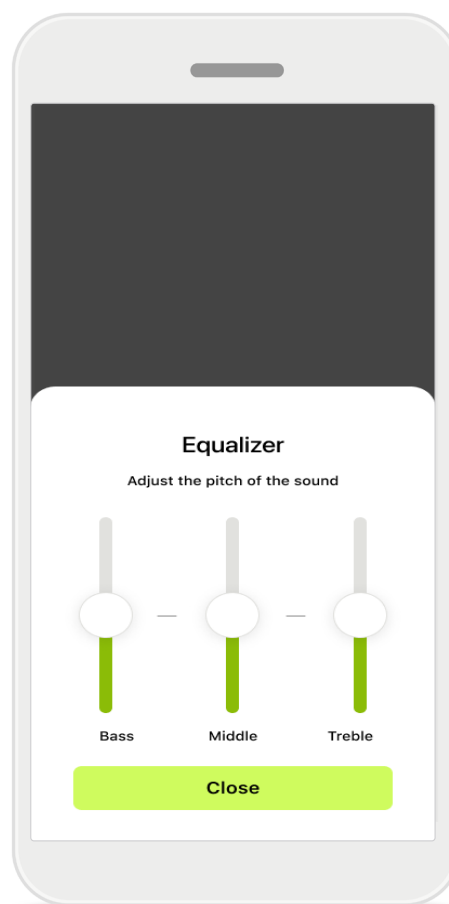


Nastavení výšky zvuku

Upravte výšku (frekvenci) zvuku pomocí posuvníků. Klepnutím na tlačítko **Zavřít** přejdete zpět k nastavením.


Domů: Náhled dálkového ovládání* – nestandardní funkce

- Podle způsobu naprogramování sluchadel a podle toho, které bezdrátové příslušenství máte, můžete upravit další nastavení, například Generátor šumu a Ekvalizaci okolního prostředí, pokud streamujete. Pokud například vaše sluchadla podporují funkci pro tinitus a jste ve streamovacím programu, můžete nastavit obojí na k tomu určených obrazovkách.

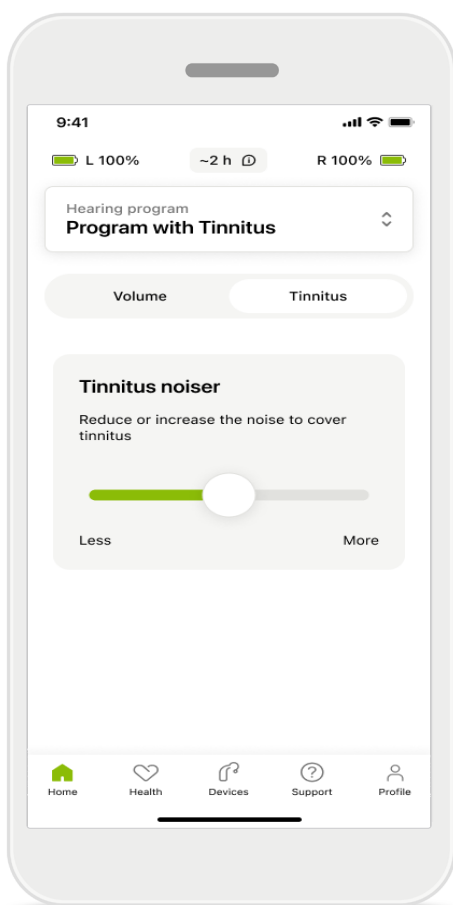

Generátor šumu (tinitus)

Máte-li tinitus a pokud jste dostali instrukce od poskytovatele sluchadel ohledně použití funkce Generátoru šumu, můžete nastavit hlasitost jeho maskování.

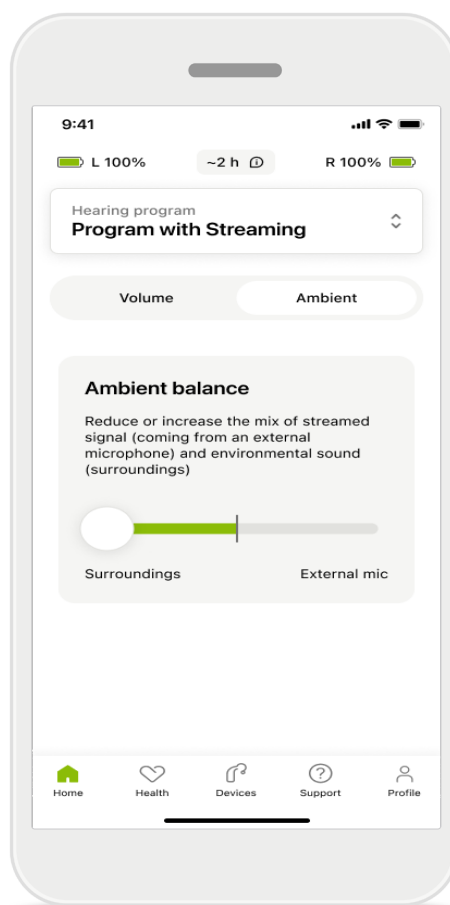


Ekvalizace okolního prostředí

Pokud používáte externí streamovací zařízení (např. TV Connector, zařízení pro hudbu), můžete nastavit zaměření tak, aby byl streamovaný signál slyšet lépe, nebo aby bylo slyšet lépe okolní prostředí.

*Podrobnosti o funkcích a kompatibilitě sluchadel sdělí poskytovatel sluchadel.

Domů: Náhled dálkového ovládání* – nestandardní funkce

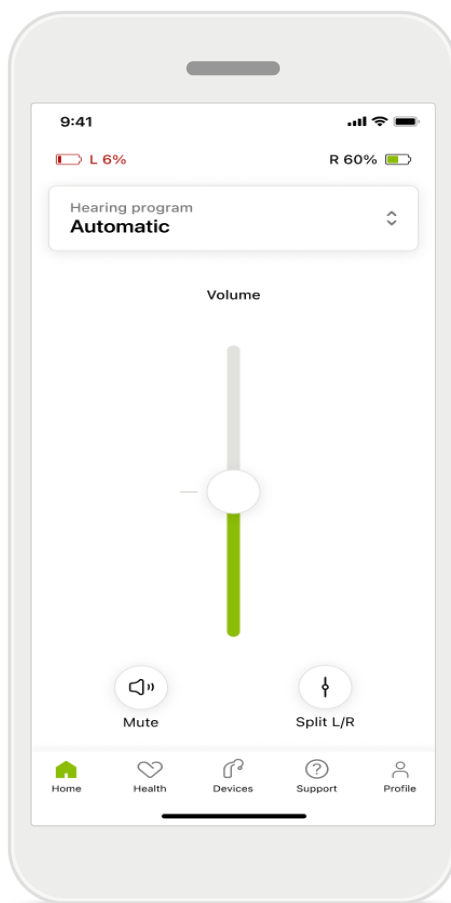


Úroveň nabití baterie

U dobíjecích sluchadel můžete zobrazit aktuální stav nabití. Je-li úroveň nabití baterie nižší než 20 %, barva ikony se změní na červenou. Baterii brzy dobijte.

*Podrobnosti o funkcích a kompatibilitě sluchadel sdělí poskytovatel sluchadel.

Domů: Pokročilé nastavení dálkového ovládání – vytvoření nového nebo aktualizace existujícího programu*

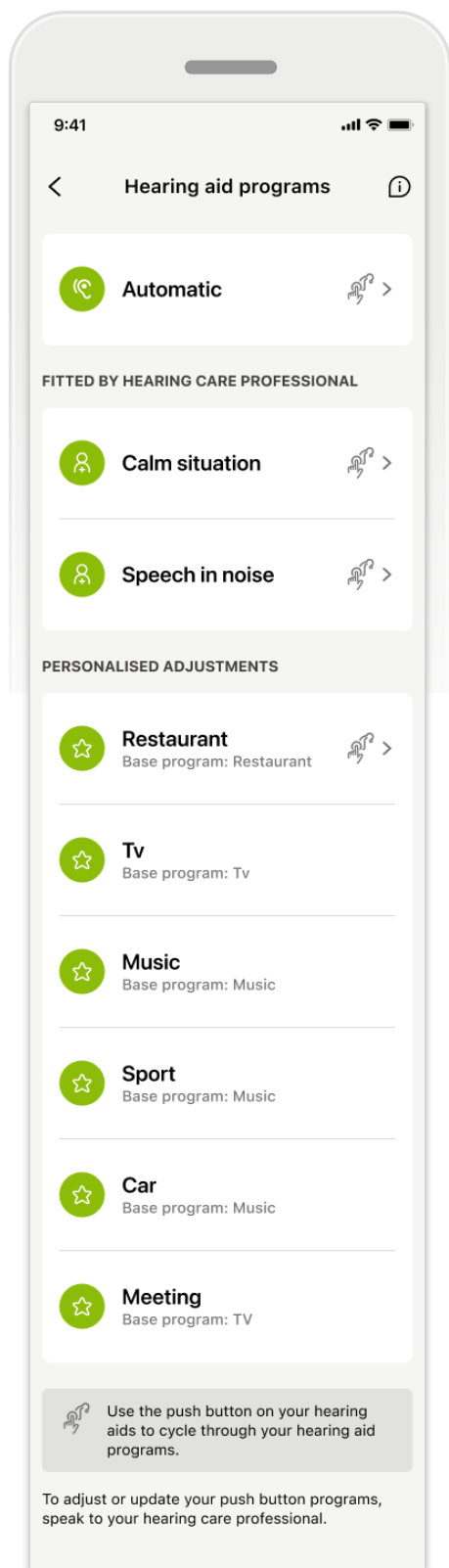

Individuální nastavení


Po nastavení stávajícího programu máte možnost jej buď **Aktualizovat**, nebo **Uložit jako nový** program. Pokud se rozhodnete jej uložit jako nový program, můžete mu dát vlastní název.

Název může mít maximálně 22 znaků a nemůžete znovu použít stejný název, nechat název prázdný ani pro název použít jen mezery.

Po úspěšném uložení nového programu se zobrazí příslušná obrazovka a vaše nové nastavení bude doplněno do horní části karuselu programů. V karuselu programů se zobrazí informace o tom, kolik zbývá volných pozic pro vlastní programy.

*Dostupné pouze pro konkrétní sluchadla. Navštivte internetové stránky <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> nebo se poraďte se svým poskytovatelem sluchadel.

Řešení problémů: Pokročilé nastavení dálkového ovládání

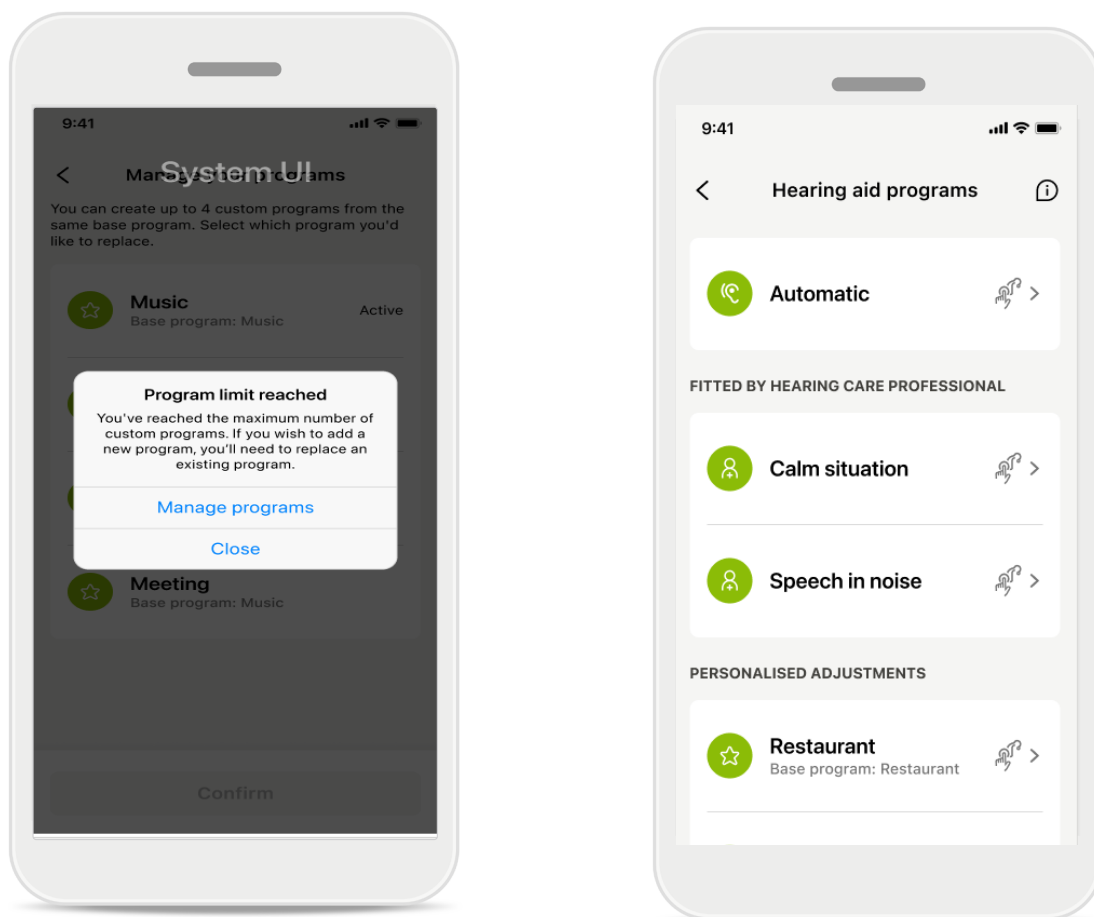


Dosaženo maximálního počtu programů – maximum pro stejný základní program

Můžete mít maximálně čtyři programy založené na témže základním programu.

Pokud dosáhnete limitu, můžete nahradit existující program za nový klepnutím na tlačítko **Spravovat**.


Zařízení

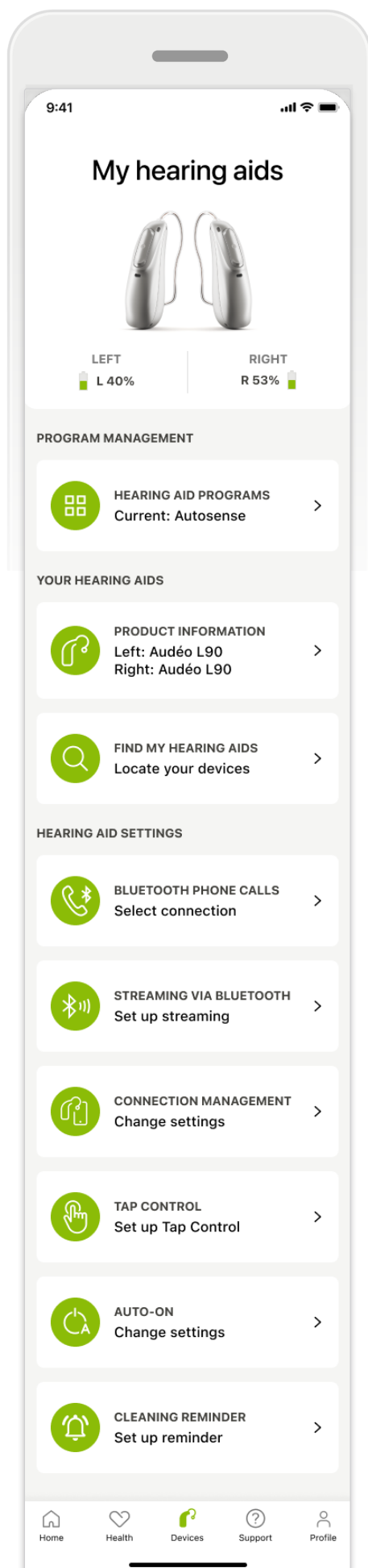

Domovská obrazovka pro Zařízení


V sekci Zařízení máte přístup ke všemu, co souvisí s vašimi sluchadly, například ke správě programů a nastavení zařízení. U dobíjecích modelů můžete také zobrazit stav baterie.

Zařízení

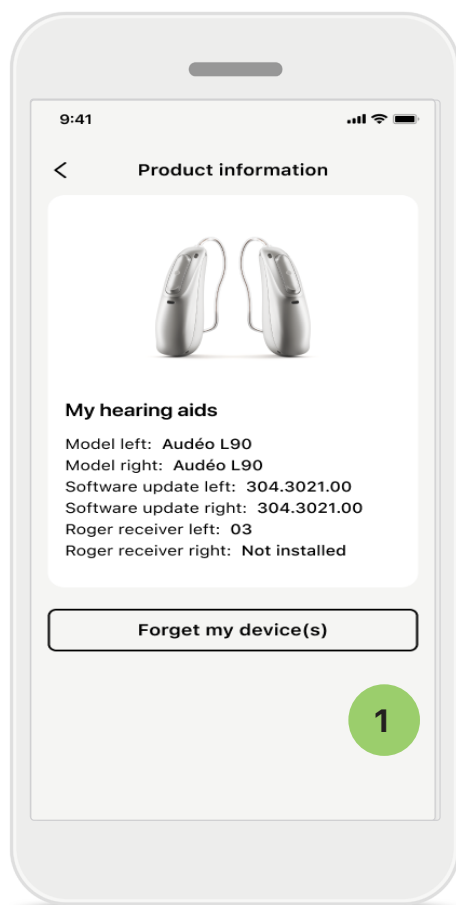

1 Odebrat zařízení


Chcete-li odebrat zařízení, přejděte na kartu Moje sluchadla. Po kliknutí na tlačítko Odebrat moje zařízení se ve vyskakovacím okně zobrazí zpráva. Odstranění je nutné potvrdit. Nezapomeňte, že pak budete muset svá sluchadla znovu spárovat, abyste mohli aplikaci používat.

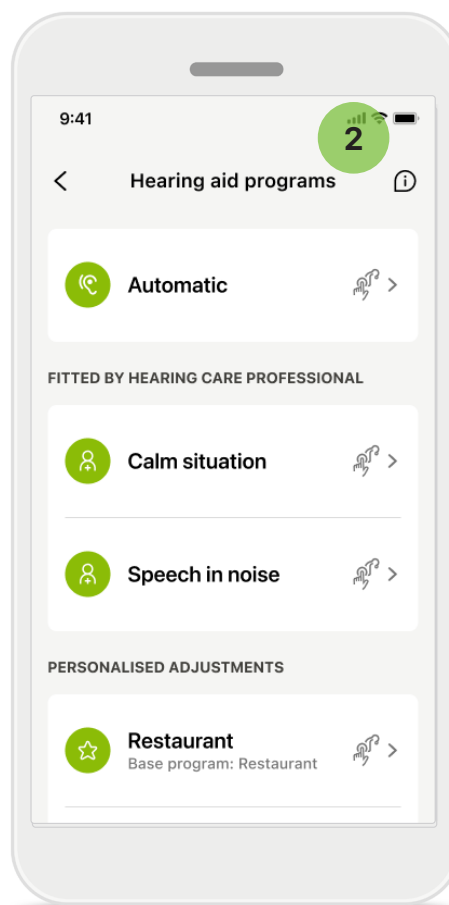

2 Správa programů


Po klepnutí na položku Programy sluchadel se zobrazí všechny dostupné programy. Chcete-li upravit název programu nebo program odstranit, klepněte na něj. Existují tři programy: **automatické, programy vytvořené poskytovatelem sluchadel a personalizované programy**. Pokud je vedle názvu programu ikona, znamená to, že je dostupný stisknutím tlačítka na sluchadlech.

Zařízení

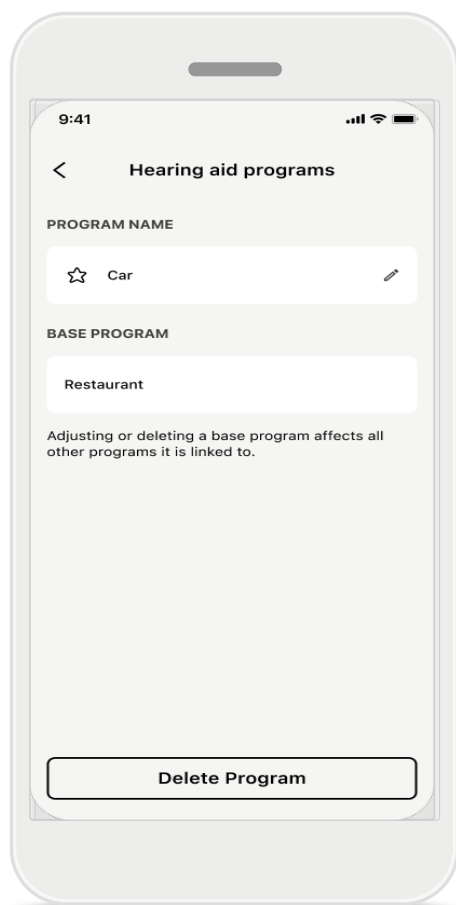

Programy sluchadel



Program můžete odstranit nebo změnit jeho název. Můžete se také podívat, se kterým základním programem je spojen. Klepnutím na tlačítko **Odstranit program** jej odstraníte. Po klepnutí na tlačítko se objeví zpráva a odstranění bude nutné potvrdit.

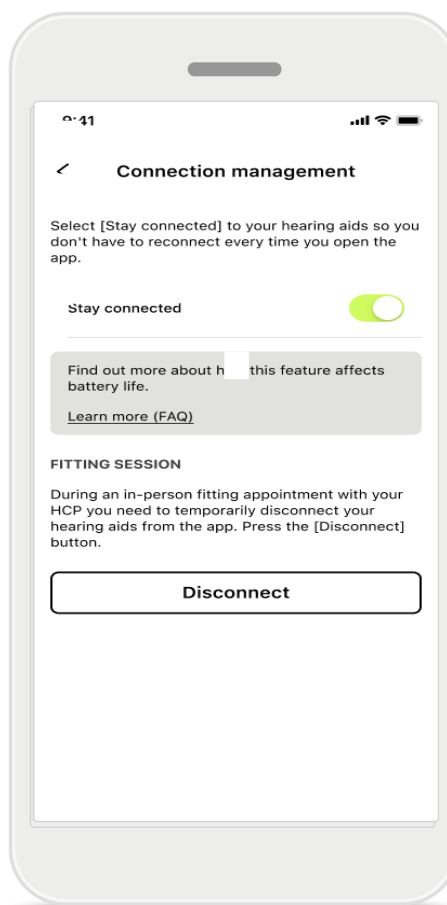

Aktivace správy připojení

Můžete volitelně aktivovat funkci **Neodpojovat**, abyste se při každém otevření aplikace nemuseli ke sluchadlům znovu připojovat.

Aktualizace

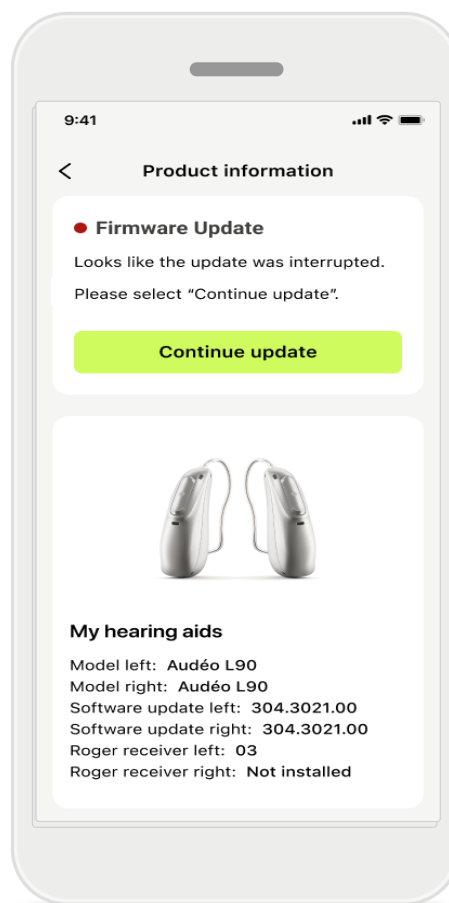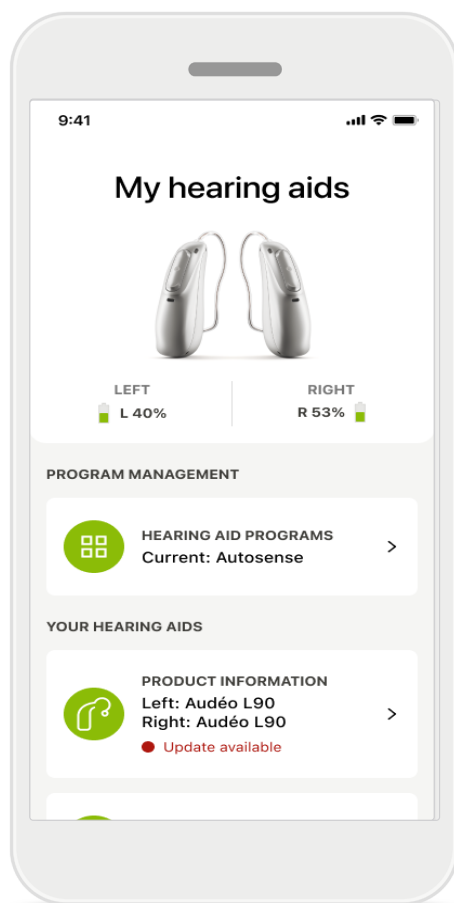


Aktualizace sluchadel

Dostupná aktualizace se zobrazí pod položkou Informace o produktu v sekci Zařízení. Pokud je nějaká aktualizace k dispozici, další informace a obsah aktualizace můžete najít v sekci Informace o produktu.

Chcete-li zahájit aktualizaci, klepněte na tlačítko **Aktualizovat**.

Aktualizace

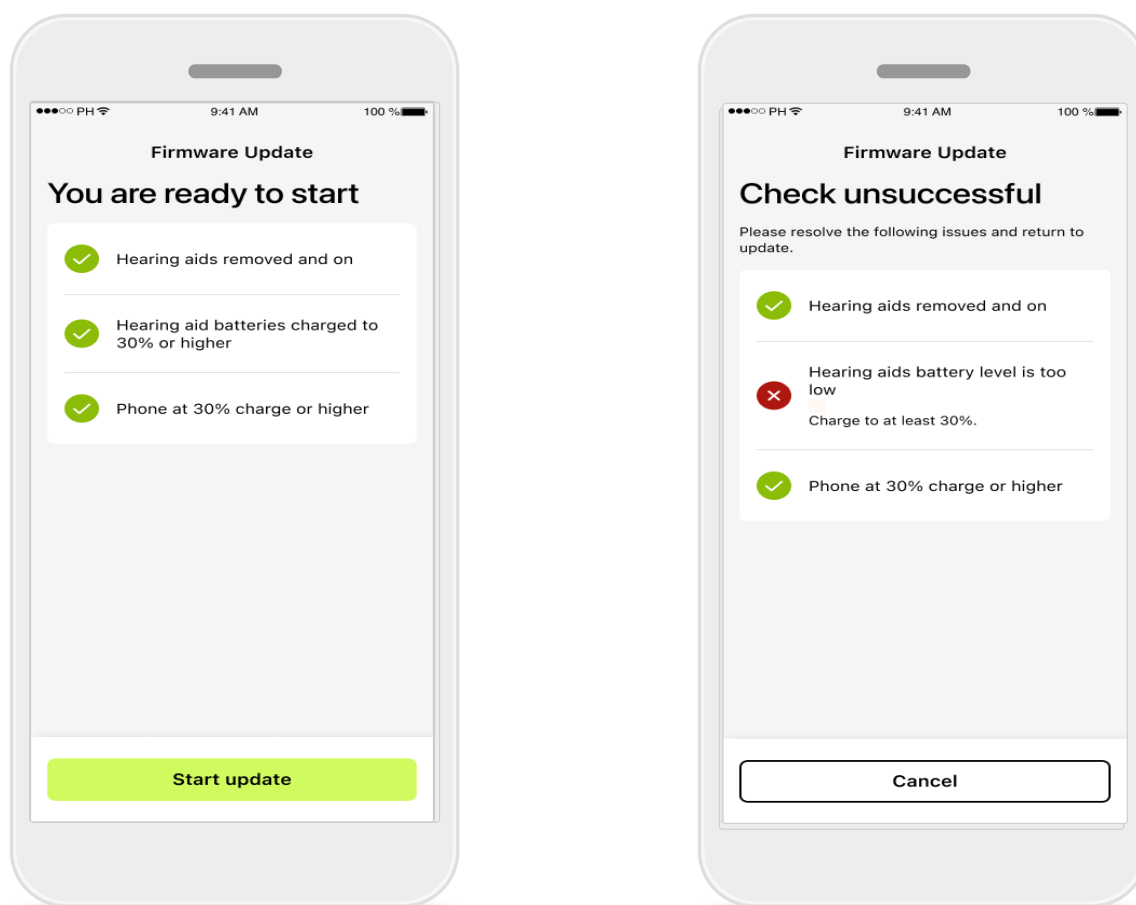


Aktualizace sluchadel

Aktualizace může být provedena za předpokladu splnění několika podmínek. Je to proto, aby aktualizace neselhala nebo nebyla přerušena (tj. baterie sluchadel musí být nabitě nejméně na 30 % nebo telefon nabitý nejméně na 30 %). Systém tyto podmínky automaticky zkontroluje a zobrazí, co není v pořádku a jak to napravit.

Dodržte tyto rady a aktualizace bude rychlá a bezproblémová.

Potřebujete-li vyřešit nějaký problém, klepněte na tento [odkaz](#).

Relace podpory a Vzdálené podpory

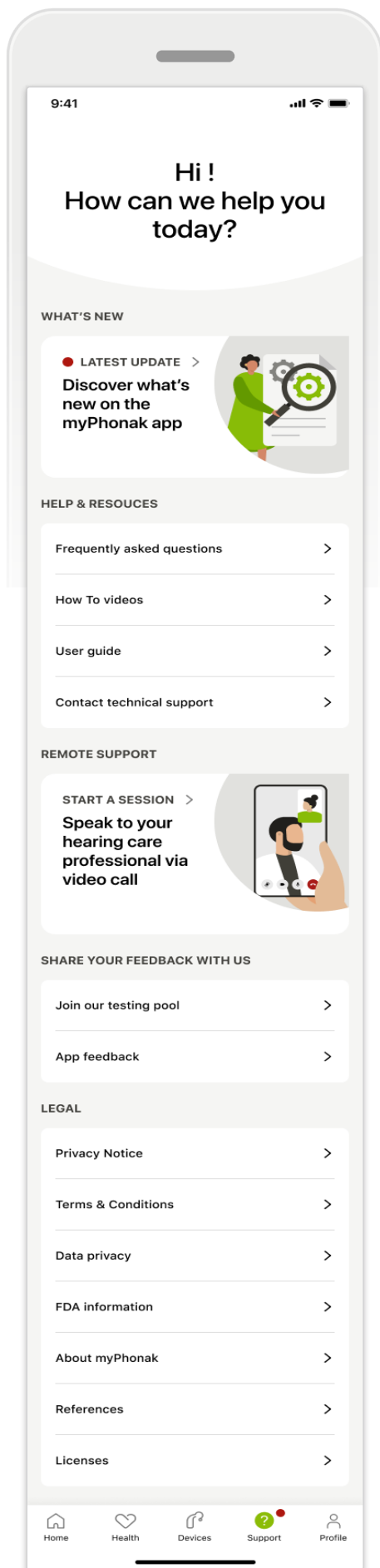


Sekce Podpora

Z obrazovky Podpory máte přístup k Často kladeným dotazům*, uživatelské příručce, internetové stránce s videonávody a k nastavení právních ustanovení a sdílení zpětné vazby. Přístup ke Vzdálené podpoře máte také klepnutím na tlačítko Zahájit relaci.

*Odkaz na Často kladené dotazy: <https://product-support.phonak.com/>.

Relace podpory a Vzdálené podpory

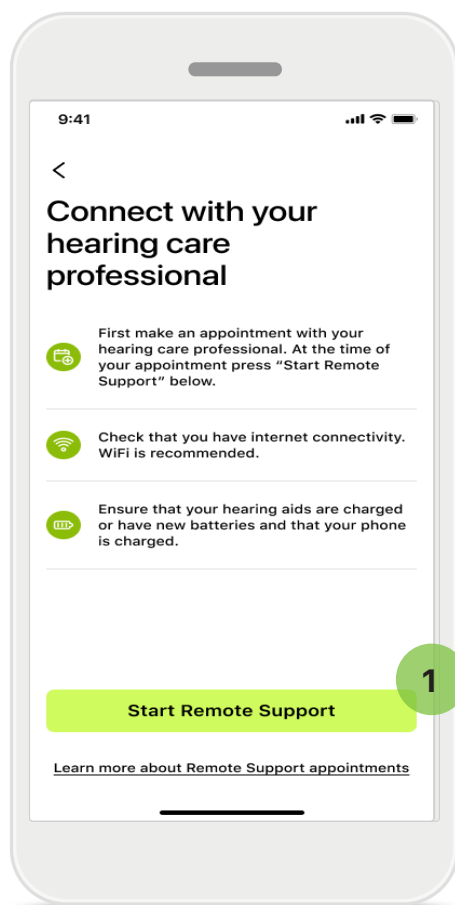

Vzdálená podpora


Klepnutím na tlačítko **Zahájit relaci** na obrazovce Podpora můžete spustit relaci Vzdálené podpory s poskytovatelem sluchadel. Vzdálenou relaci je nutné naplánovat předem.

- 1 Chcete-li pokračovat, Klepněte na tlačítko **Spustit Vzdálenou podporu**.

Přístup k mikrofonu a kameře

Budete-li požádáni o souhlas s použitím mikrofonu a kamery, klepnutím na tlačítko **OK** povolíte, aby aplikace myPhonak měla přístup k vašemu mikrofonu a kameře.



Relace podpory a Vzdálené podpory

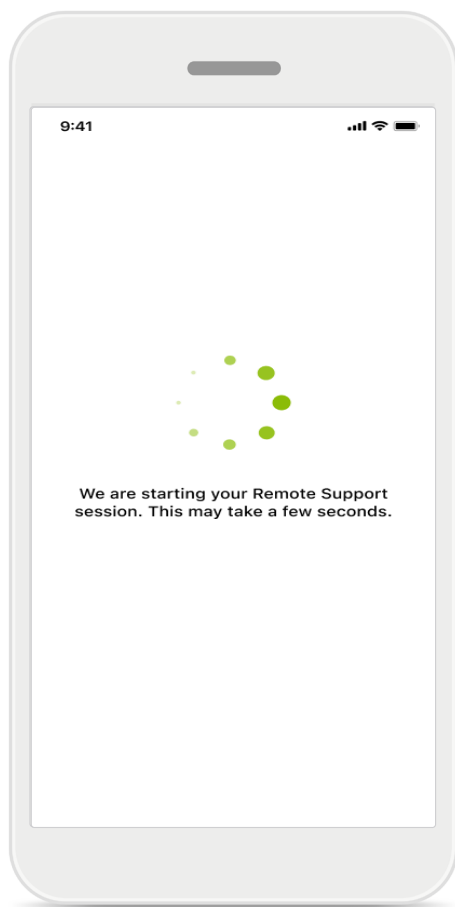

Čekání na poskytovatele sluchadel

Aplikace vás spojí s vaším poskytovatelem sluchadel. Počkejte, dokud poskytovatel sluchadel nepřijme hovor.

Zahájení relace Vzdálené podpory

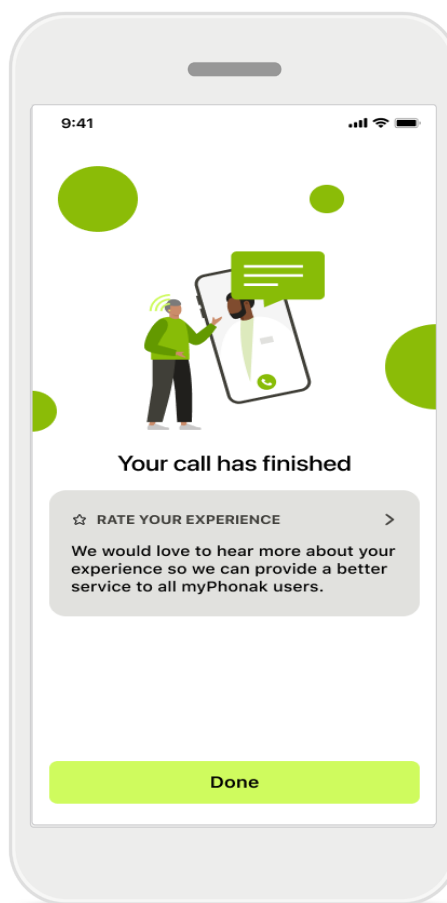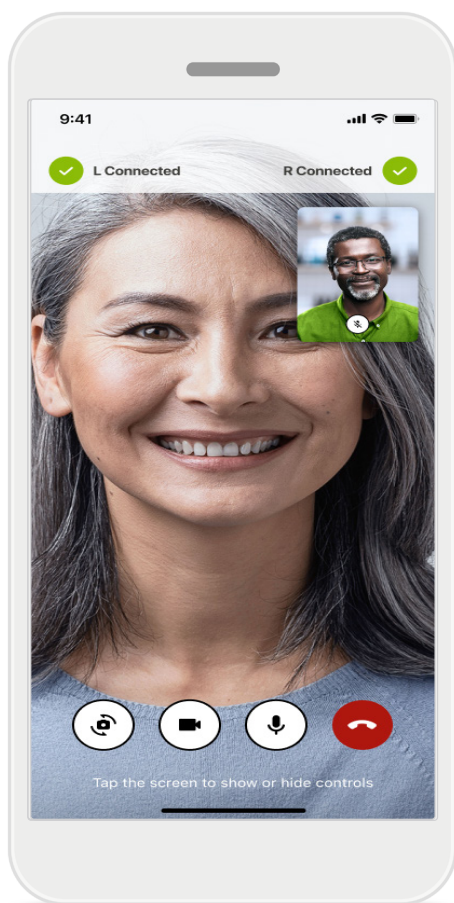

Po navázání spojení budete moci poskytovatele sluchadel vidět a slyšet. Ovládacími tlačítky můžete ztlumit zvuk nebo zrušit ztlumení, deaktivovat video, přepnout kamery, nebo hovor ukončit.

Pokud se poskytovatel sluchadel potřebuje připojit k vašim sluchadlům, může to provést vzdáleně prostřednictvím vašeho chytrého telefonu. Až bude spojení navázáno, poskytovatel sluchadel vám to oznámí.

Po skončení hovoru můžete svoji zkušenost ohodnotit. Klepnutím na odkaz svou zpětnou vazbu odešlete. Klepnutím na tlačítko **Hotovo** přejdete zpět na domovskou obrazovku.

Řešení problémů: Relace Vzdálené podpory



Relace Vzdálené podpory využívá internet, aby vás spojila s poskytovatelem sluchadel. Pro lepší kvalitu doporučujeme použít síť Wi-Fi.



Ztráta spojení se sluchadly

Spojení se sluchadly je vidět v horní části obrazovky. Pokud se sluchadla odpojí, barva symbolu se změní na červenou. Váš poskytovatel sluchadel se pak bude muset znovu připojit.

Řešení problémů: Relace Vzdálené podpory

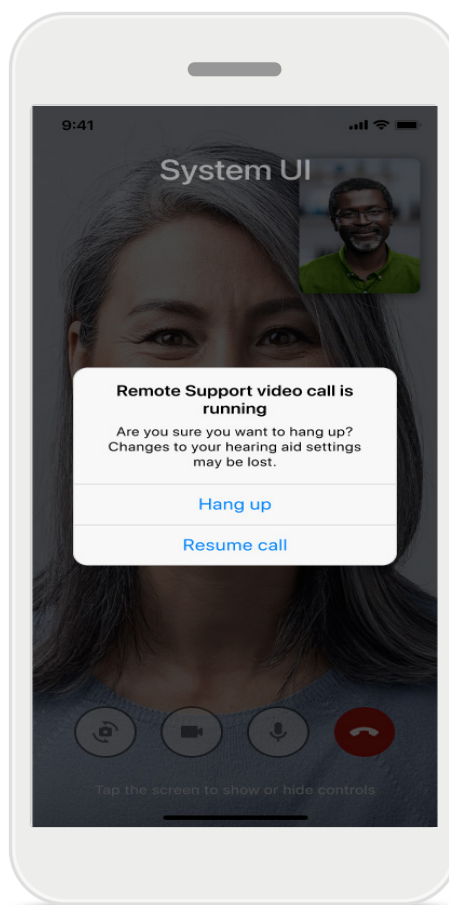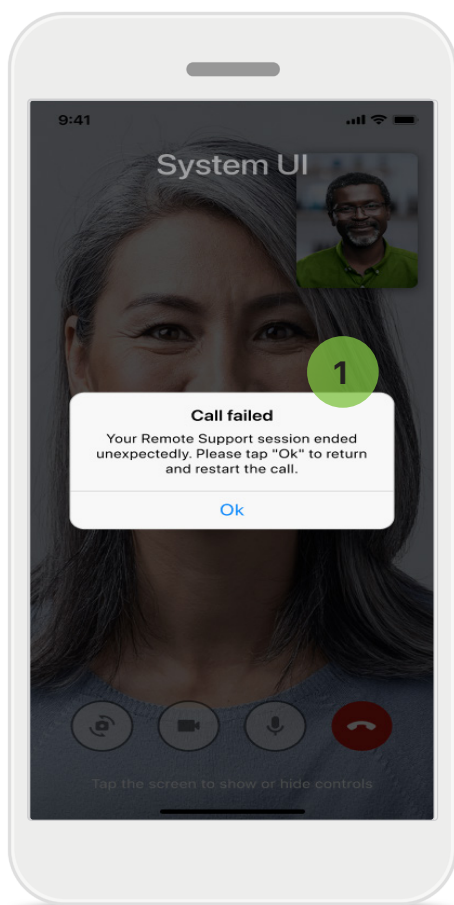

- 1 Hovor selhal**
Pokud hovor selže, stisknutím tlačítka **OK** se vrátíte na domovskou obrazovku, kde můžete znovu zahájit hovor.

Ukončení hovoru v jeho průběhu
Tato zpráva se zobrazí ve vyskakovacím okně, pokud ukončíte probíhající hovor.

Sledování zdravotních údajů v sekci Zdraví: Nastavení


Některé zde popisované funkce v aplikaci Zdraví jsou dostupné pouze s určitými sluchadly. Další informace si přečtete na internetových stránkách <https://www.phonak.com>.

Abyste měli přístup k funkcím zaměřeným na zdraví , musíte se přihlásit ke svému účtu v aplikaci myPhonak.

Povolením Služeb určování polohy ve svém iPhone zlepšíte kvalitu sledování zdravotních údajů.

Po odmítnutí přístupu nebudete moci své zdravotní údaje sledovat.

Zadejte podrobnosti o své osobě, abyste umožnili přesný výpočet zdravotních údajů. Pamatujte, že tyto informace jsou nepovinné. Máte nad nimi plnou kontrolu!

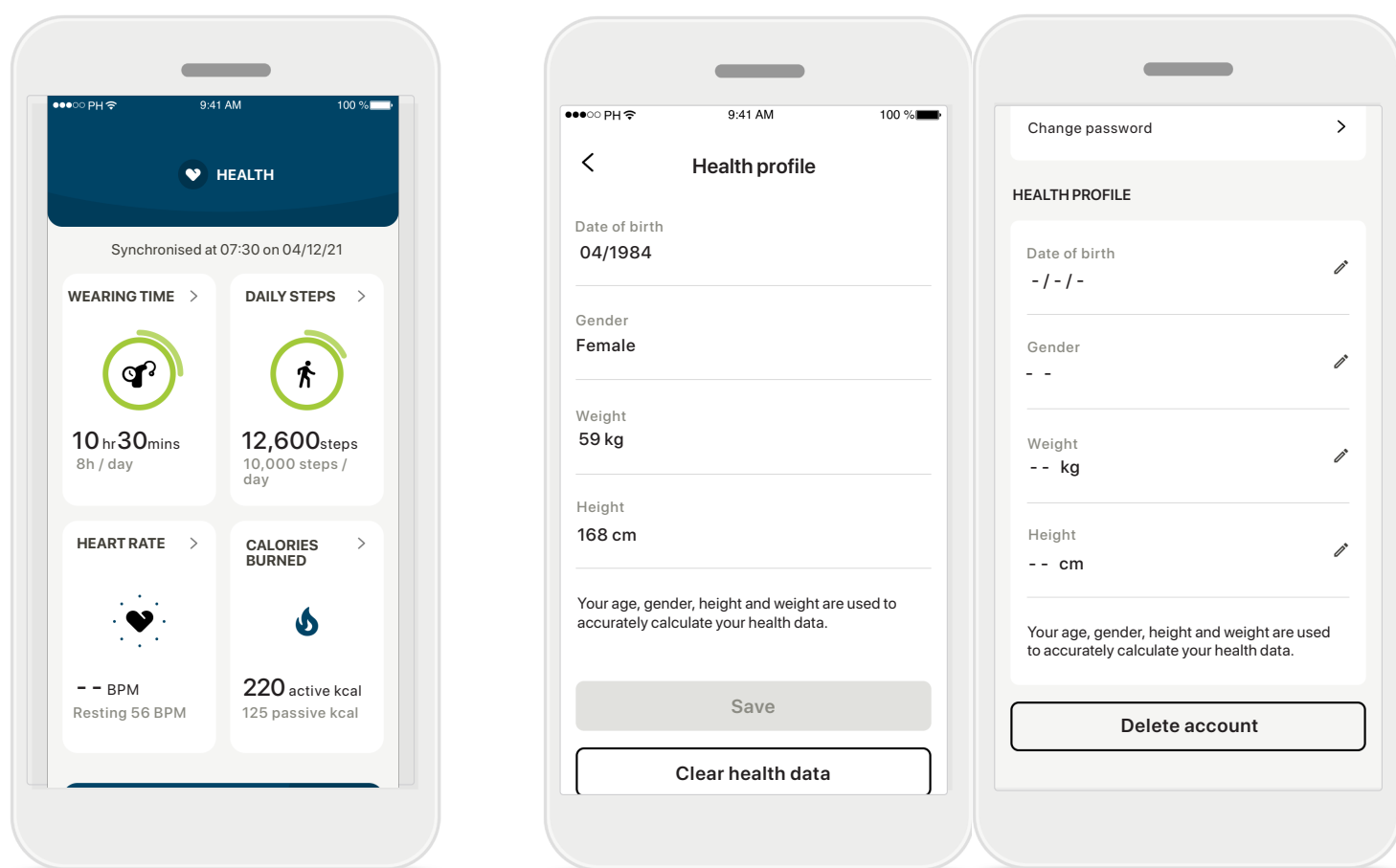

Vstup do aplikace Zdraví

Až bude nastavení hotovo, můžete přejít na panel nástrojů zaměřených na zdraví (domovská obrazovka aplikace Zdraví).



Úprava/smazání profilu v aplikaci Zdraví

Zdravotní údaje ve svém profilu můžete kdykoliv upravit nebo smazat v sekci Profil. Přejděte k sekci Osobní údaje, přejedte dolů k sekci Zdravotní profil a klepnutím na ikonu úprav (tužka) aktualizujte nebo smažte své údaje.

Panel nástrojů aplikace Zdraví

V panelu nástrojů zaměřených na zdraví budete:

- mít přístup k funkcím zaměřeným na zdraví, které jsou podporovány vašimi sluchadly, a sledovat změny jejich hodnot v reálném čase,*
- moci zobrazit průběh dosahování cílů, jsou-li nastaveny,
- mít přístup k tipům zaměřeným na zdraví (doporučení na jiné aplikace zaměřené na zdraví).

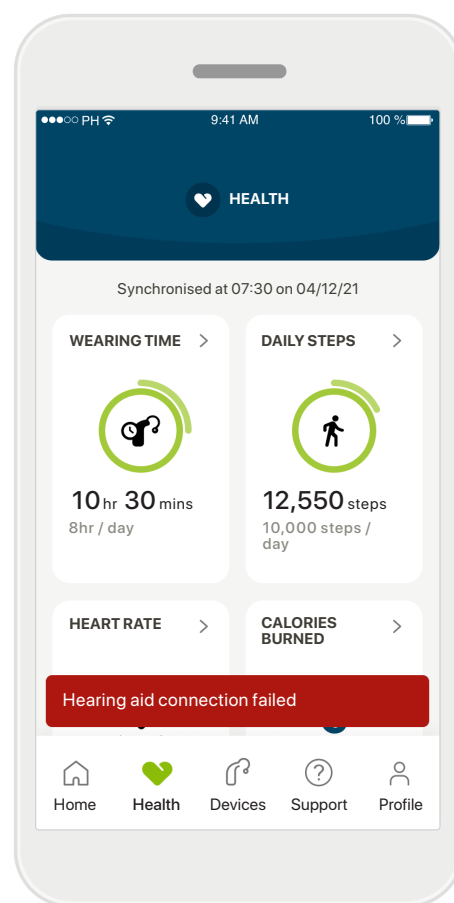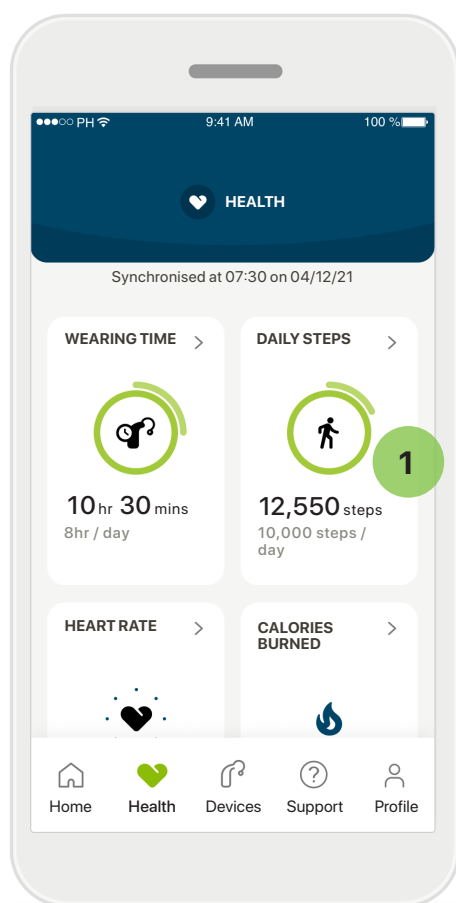

1

Překročení cílové hodnoty

Máte-li nastavené cíle, své pokroky uvidíte v zeleném kroužku kolem ikony pro každou funkci. Pokud maximální hodnotu svého cíle překročíte, kolem ikony se zobrazí druhý kroužek.

Připojení ke sluchadlům

Abyste mohli sledovat, jak se hodnoty funkcí zaměřených na zdraví mění v reálném čase, musíte mít aktivní připojení ke sluchadlům. Častá synchronizace aplikace se sluchadly umožňuje přesnější časové údaje. Pokud se připojení nezdaří nebo data nelze synchronizovat, obdržíte o tom oznámení s odkazem na internetovou stránku s častými dotazy a radami, co dělat.


*Dostupné pouze pro konkrétní sluchadla. Navštivte internetové stránky <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> nebo se poraďte se svým poskytovatelem sluchadel.

Informace uvedené v této části slouží pouze ke vzdělávacím a informačním účelům. Informace uvedené v aplikaci Zdraví by neměly sloužit jako náhrada za odborné lékařské poradenství.

Před zahájením cvičebního programu, nebo máte-li dotazy týkající se vašeho zdraví, měli byste se vždy poradit s lékařem nebo jiným zdravotníkem.

Chcete-li sledovat svou tepovou frekvenci, ujistěte se, že máte ušní koncovky ve zvukovodu správně zasunuté. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete v klidu a potichu.

Podrobný přehled funkcí aplikace Zdraví: doba nošení, počet kroků, úroveň aktivit,* vzdálenost, kterou jste ušli a uběhli*

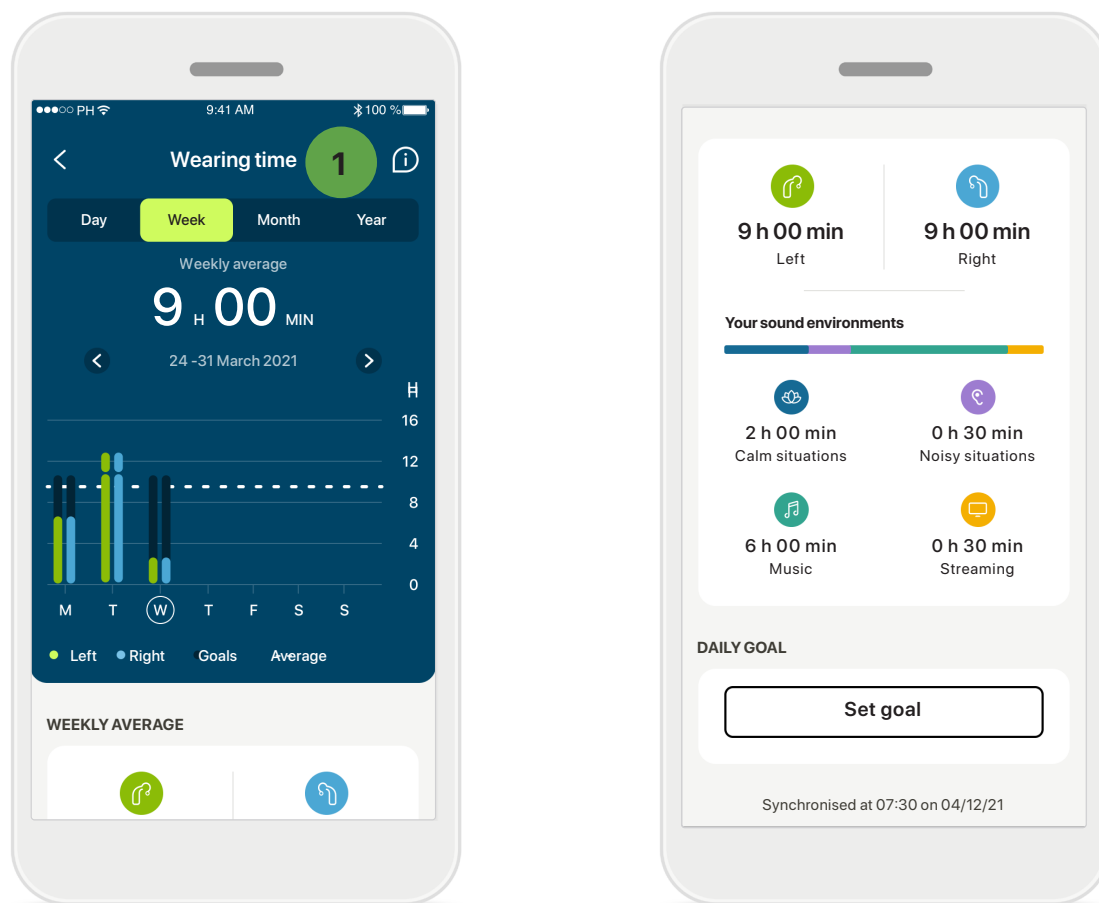


1 Doba nošení

Kliknutím na kartu pro dobu nošení v panelu nástrojů přejdete ke grafu přehledu denního nošení. Klepnutím na příslušnou záložku, která změní barvu na zelenou, přejdete na zobrazení týdenních, měsíčních či ročních hodnot.

Máte-li dvě sluchadla, grafy zobrazí hodnotu pro levé i pravé sluchadlo. Níže vidíte aktuální (pro denní zobrazení) nebo průměrné hodnoty (pro jiné než denní zobrazení) a dále rozčlenění doby nošení v různých zvukových prostředích.

*Dostupné pouze pro konkrétní sluchadla. Navštivte internetové stránky <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> nebo se poraďte se svým poskytovatelem sluchadel.

Podrobný přehled funkcí aplikace Zdraví: doba nošení, počet kroků, úroveň aktivit*, vzdálenost, kterou jste ušli a uběhli*

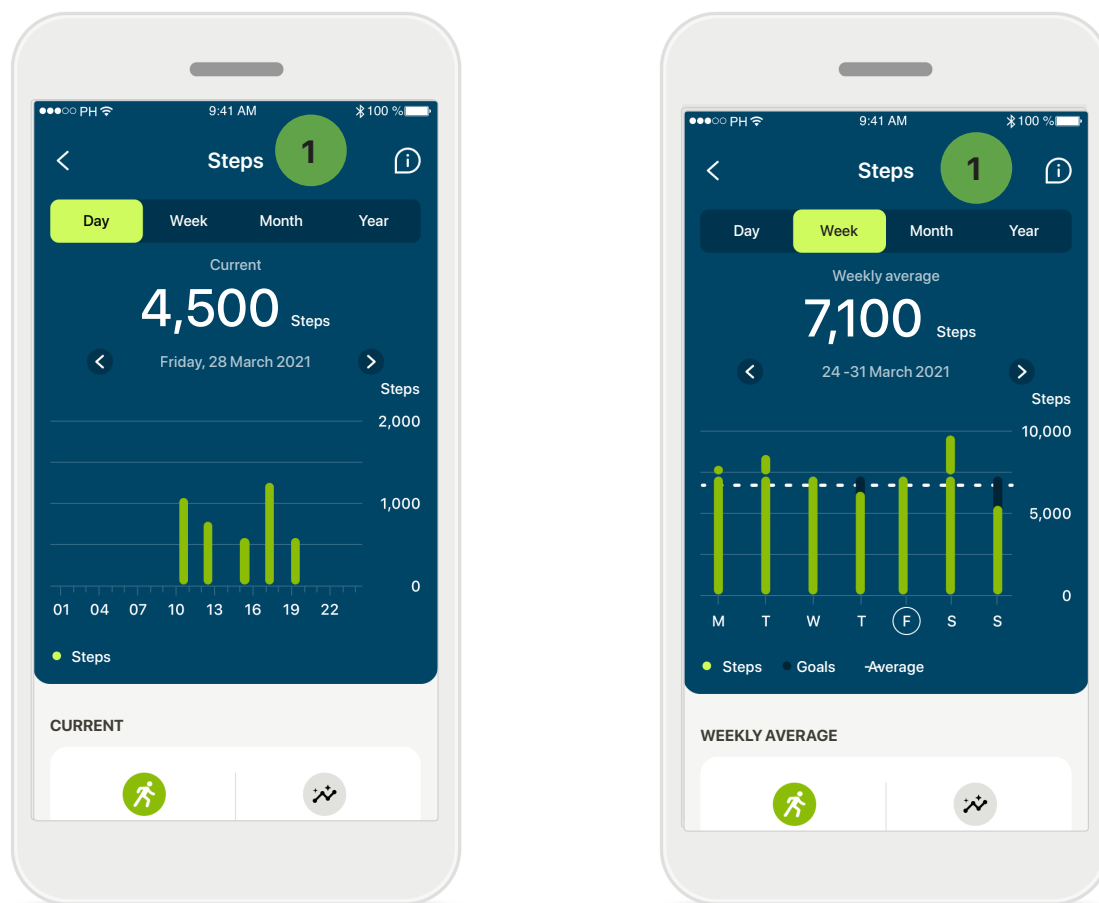

1 Počet kroků, úroveň aktivity a vzdálenost


Kliknutím na kartu pro měření kroků v panelu nástrojů přejdete ke grafu denního počtu kroků. Na zobrazení týdenních, měsíčních či ročních hodnot můžete přejít klepnutím na příslušnou záložku, která změní barvu na zelenou.

Níže vidíte aktuální (pro denní zobrazení) nebo průměrné hodnoty (pro jiné než denní zobrazení) a dále přibližnou vzdálenost, kterou jste ušli nebo uběhli.**

Úrovně aktivity zobrazují dobu, kdy jste neprováděli žádnou, nízkou (zjištěn určitý pohyb), středně vysokou (zjištěna chůze) nebo vysokou (zjištěn běh) aktivitu.

*Dostupné pouze pro konkrétní sluchadla. Navštivte internetové stránky <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> nebo se poraďte se svým poskytovatelem sluchadel.

Podrobný přehled funkcí aplikace Zdraví: tepová frekvence* a kalorie* spálené chůzí a během*

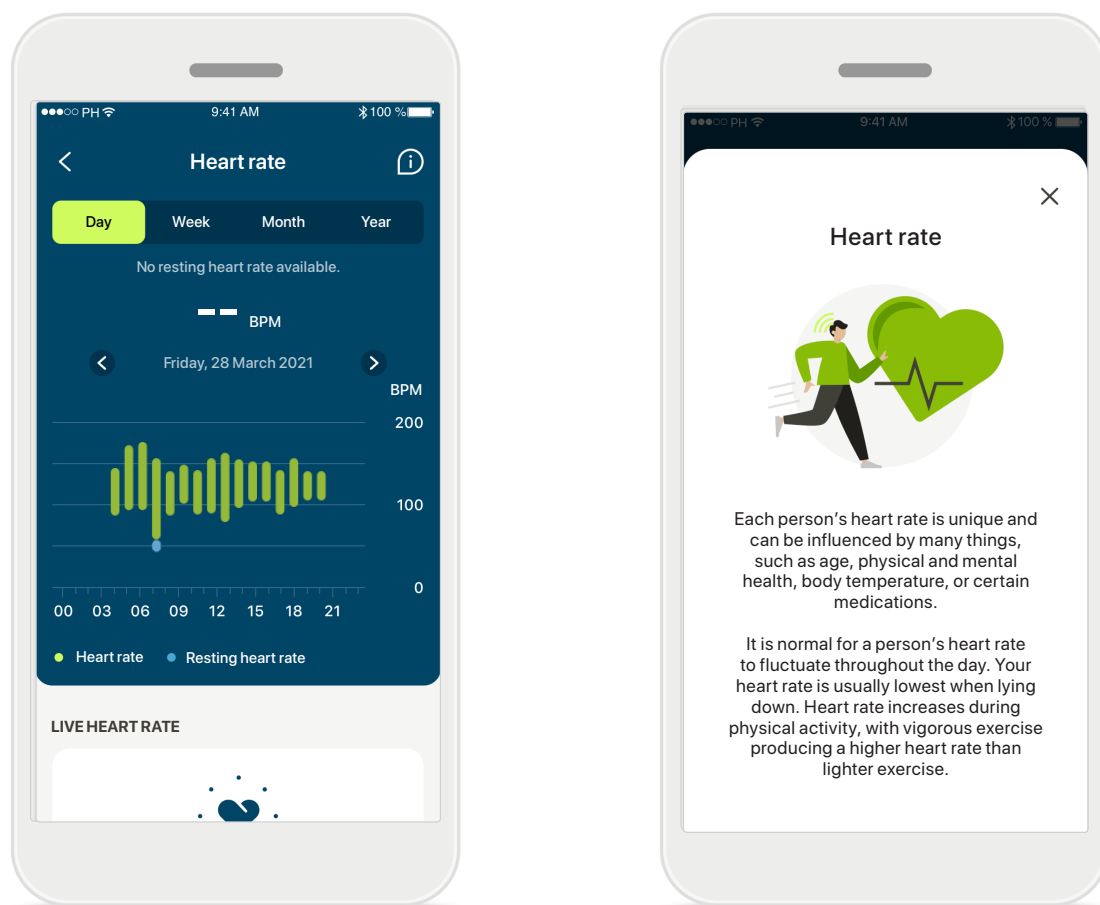

Sledování tepové frekvence (TF)


Všechna zobrazení obsahují TF při aktivitě. Zobrazení denních hodnot obsahuje klidovou tepovou frekvenci (KTF) a rozsahy TF v jednotlivých hodinách. Zobrazení týdenních hodnot obsahuje průměrnou klidovou tepovou frekvenci (KTF) za den, tepovou frekvenci při aktivitě a rozsahy TF za den.

Zobrazení týdenních, měsíčních a ročních hodnot zahrnují:

- Zobrazení denních hodnot – rozlišení po hodinách (periodické TF a rozsahy TF při aktivitě v jednotlivých hodinách, jedna nejnižší klidová TF za den).
- Zobrazení týdenních/měsíčních/ročních hodnot – rozlišení rozsahů TF a KTF po dnech/týdnech/měsících.

Kliknutím na ikonu  v pravé horní části obrazovky získáte další informace a reference o tepové frekvenci a o tom, proč je důležité sledovat klidovou tepovou frekvenci.

Podrobný přehled funkcí aplikace Zdraví: tepová frekvence* a kalorie* spálené chůzí a během*

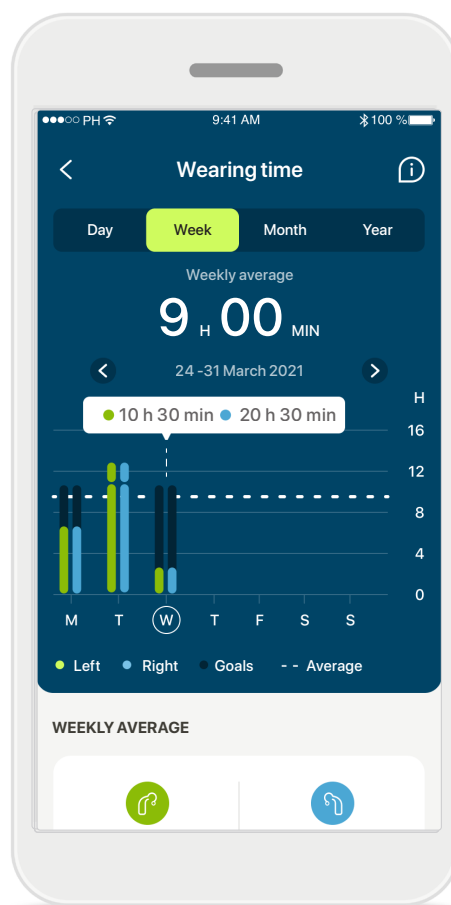

1 Sledování kalorií


Zobrazení denních hodnot obsahuje aktuální aktivní kalorie (spálené fyzickou aktivitou) a pasivní kalorie (na základě bazálního metabolismu). Součet obou typů kalorií (celkem) je znázorněn v grafu. Zobrazení týdenních, měsíčních a ročních hodnot obsahuje průměrné hodnoty aktivních kalorií, pasivních kalorií a jejich součty.

Popis tlačítek

Po klepnutí na některé místo v pruhovém grafu se v bílém proužku (popisu tlačítka) zobrazí přesná hodnota.

*Dostupné pouze pro konkrétní sluchadla. Navštivte internetové stránky <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> nebo se poraďte se svým poskytovatelem sluchadel.

Aplikace Zdraví: Ostatní funkce*

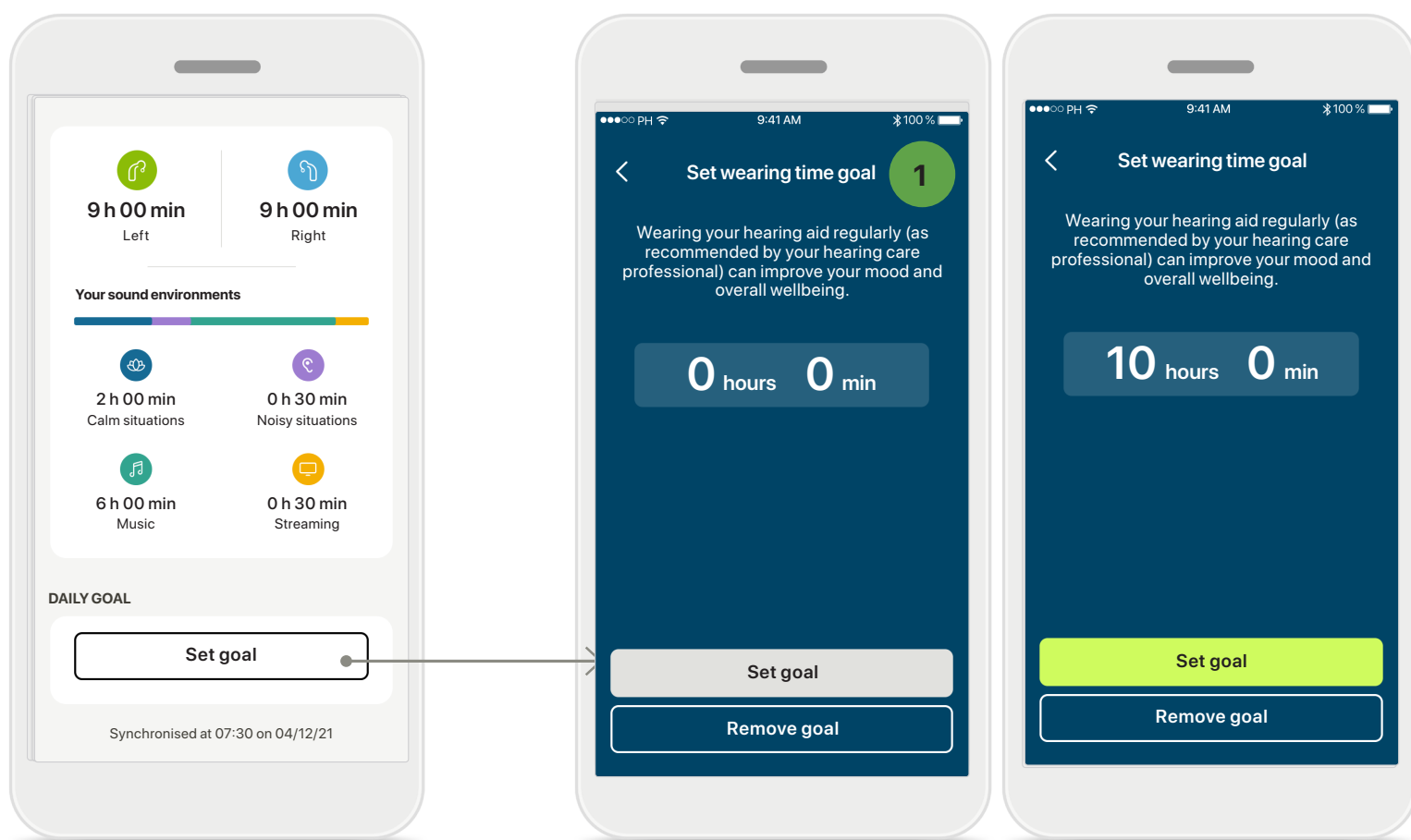


1 Nastavení, změna a odebrání cílů*

Nastavení cílů je volitelné u měření počtu kroků a doby nošení. Můžete je nastavit během nastavování funkcí aplikace Zdraví, v panelu nástrojů aplikace Zdraví nebo v podrobných zobrazeních těchto funkcí.

Klepněte na tlačítko **Nastavit cíl** nebo **Změnit cíl** a přecházejte z jedné obrazovky na druhou podobně jako v příkladu nahoře. Zadejte platnou hodnotu pro dobu nošení nebo počtu kroků a klepnutím na tlačítko **Nastavit cíl** své změny uložte. Chcete-li svůj cíl odstranit, klepněte na tlačítko **Odebrat cíl**.

*Dostupné pouze pro konkrétní sluchadla. Navštivte internetové stránky <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> nebo se poraďte se svým poskytovatelem sluchadel.

Aplikace Zdraví: Ostatní funkce*

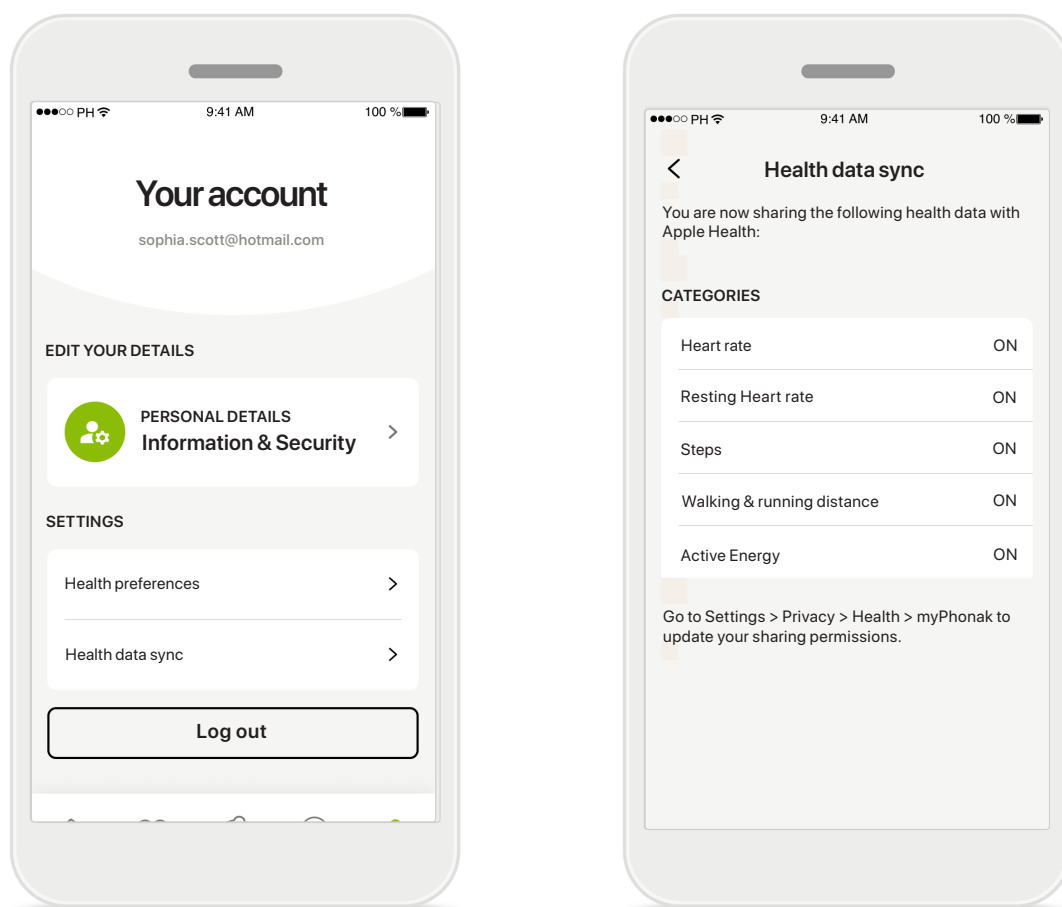

Synchronizujte zdravotní údaje z Phonaku s aplikací Apple Zdraví

Na kartě Profil v sekci Nastavení otevřete obrazovku Synchronizace zdravotních údajů. Podle pokynů zapněte v aplikaci myPhonak zdravotní údaje, které chcete synchronizovat s aplikací Apple Zdraví. Po synchronizaci a novém otevření obrazovky Synchronizace zdravotních údajů uvidíte, které údaje sdílíte s aplikací Apple Zdraví.

*Dostupné pouze pro konkrétní sluchadla. Navštivte internetové stránky <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> nebo se poraďte se svým poskytovatelem sluchadel.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím aplikace si prosím přečtěte relevantní bezpečnostní informace na následujících stranách.

Určený účel použití:

Aplikace je samostatný software určený pro uživatele sluchadel a slouží k výběru, konfiguraci a ukládání nastavení sluchadel, a to v omezeném rozsahu, který umožňuje nastavovací software. Aplikace také zamýšleným uživatelům sluchadel umožňuje a pomáhá spojit se a komunikovat s poskytovateli sluchadel za účelem vzdáleného nastavení sluchadel.

Určená populace pacientů:

Zařízení je určeno pacientům starším 18 let, kteří splňují klinickou indikaci pro kompatibilní sluchadlo.

Určený uživatel:

Osoba se ztrátou sluchu, která používá kompatibilní zařízení.

Indikace:

Upozorňujeme, že indikace nejsou odvozeny z aplikace, ale z kompatibilních sluchadel. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce ke svému sluchadlu.

Kontraindikace:

Upozorňujeme, že kontraindikace nejsou odvozeny z aplikace, ale z kompatibilních sluchadel.

Klinický přínos:

Klinický přínos nevyplývá z aplikace, ale z kompatibilních sluchadel.

Přínosy aplikace pro určené uživatele spočívají v poskytnutí možnosti nastavit a uložit nastavení sluchadel podle individuálních potřeb, a to v rozsahu, který umožňuje počáteční nastavení. Aplikace určeným uživatelům poskytuje pohodlný způsob komunikace a spojení s poskytovateli sluchadel za účelem vzdáleného nastavení sluchadel.

Vedlejší účinky:

Není známo, že by s používáním aplikace byly spojeny vedlejší účinky.

Omezení použití:

Používání aplikace je omezeno možnostmi kompatibilního/kompatibilních zařízení. Podrobnosti jsou uvedeny v uživatelské příručce k vašemu sluchadlu. Upozorňujeme, že pro využití všech funkcí aplikace je nutné stálé připojení k internetu.

Jakákoli závažná událost, která se vyskytla v souvislosti s aplikací, by měla být nahlášena zástupci výrobce a příslušnému orgánu ve státě bydliště. Závažná událost je popsána jako jakákoli událost, která přímo nebo nepřímo vedla, mohla vést anebo může vést k některé z následujících situací:

- a. smrti pacienta, uživatele anebo jiné osoby,
- b. dočasnému nebo trvalému závažnému zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele anebo jiné osoby,
- c. vážnému ohrožení veřejného zdraví.

Chcete-li ohlásit neočekávanou operaci nebo událost, kontaktujte výrobce nebo jeho zástupce.

Uživatelská příručka pro všechny verze aplikace v příslušných jazycích v digitální podobě je k dispozici na internetových stránkách. Přístup k uživatelským příručkám získáte takto:

- Klikněte na <https://www.phonak.com/en-int/global-locations> a vyberte příslušnou zemi.
- Přejděte na stránku „Support“ (v angličtině) nebo její ekvivalent v příslušném jazyce.
- Přejděte na stránku „User Guides“ (v angličtině) nebo její ekvivalent v příslušném jazyce.
- Přejděte na stránku „Apps“ (v angličtině) nebo její ekvivalent v příslušném jazyce.
- Vyberte možnost „myPhonak app“ (v angličtině).

Aktuální verze uživatelské příručky k aplikaci myPhonak je také dostupná přímo v aplikaci, když po přechodu do sekce Podpora klepnete na kartu s názvem „Uživatelská příručka“. Uživatelská příručka se pak otevře v novém okně prohlížeče.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím aplikace si prosím přečtěte relevantní bezpečnostní informace na následujících stranách.

Bezpečnostní upozornění

Údaje o pacientech představují osobní údaje a jejich ochrana je důležitá:

- Ujistěte se, že máte v chytrých telefonech nejnovější bezpečnostní aktualizace operačního systému. Aktivujte automatické aktualizace.
- Ujistěte se, že máte nainstalovanou aktuální verzi aplikace.
- Používejte pro svá sluchadla pouze původní aplikace společnosti Sonova z oficiálních obchodů.
- Instalujte pouze důvěryhodné aplikace z oficiálních obchodů.
- Ujistěte se, že používáte silná hesla a uchovávejte přihlašovací údaje v tajnosti.
- Telefon zamykejte kódem PIN a/nebo pomocí biometrie (např. otisku prstu, snímku obličeje) a nastavte telefon na automatické uzamknutí po několika minutách nečinnosti.
- Ujistěte se, že nainstalované aplikace mají jen taková oprávnění, která jsou nutná.
- Neprovádějte párování Bluetooth se svými sluchadly na veřejných prostranstvích. Je to kvůli riziku nežádoucího rušení ze strany cizích osob. Doporučujeme provádět párování Bluetooth doma.
- NEPOUŽÍVEJTE telefon přepnutý do privilegovaného režimu (jailbroken/rooted). Zajistěte, aby byla data vždy zabezpečena. Mějte prosím na paměti, že tento výčet bezpečnostních opatření není úplný.
- Při přenosu dat prostřednictvím nezabezpečených kanálů buď odesílejte anonymní údaje, nebo je zašifrujte.
- Chraňte zálohy dat svého chytrého telefonu nejen před ztrátou dat, ale také před krádeží.
- Odstraňte všechna data z chytrého telefonu, který již nepoužíváte nebo který bude zlikvidován.

i Změna nastavení, např. snížení hlasitosti nebo zesílení rušení hluku může vést k nebezpečným situacím, například nemusíte uslyšet blížící se vozidlo.

Údržba softwaru:

Neustále sledujeme zpětnou vazbu od našich zákazníků. Budete-li mít s nejnovější verzí aplikace jakékoli potíže, obraťte se prosím na místního zástupce výrobce a/nebo poskytněte zpětnou vazbu v obchodu AppStore nebo Google Play Store.



Údaje o splnění předpisů

Evropa: Prohlášení o shodě

Společnost Sonova AG tímto potvrzuje, že tento výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických zařízeních.

Vysvětlivky k použitým symbolům



Tento symbol označuje, že je důležité, aby si uživatel přečetl a zohlednil příslušné informace uvedené v této uživatelské příručce.



Tento symbol znamená, že je důležité, aby se uživatel řídil relevantními upozorněními uvedenými v této uživatelské příručce.



Důležité informace týkající se manipulace s výrobkem a jeho bezpečnosti.



Symbolem CE společnost Sonova AG potvrzuje, že tento výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích. Čísla za symbolem CE jsou kódy certifikovaných institucí konzultovaných na základě výše uvedených směrnic.



Označuje zplnomocněného zástupce v Evropském společenství. Zástupce pro ES je také dovozce do Evropské unie.



Označuje, že zařízení je zdravotnickým prostředkem.



Název, adresa, datum

Kombinovaný symbol „výrobce zdravotnického prostředku“ a „datum výroby“, jak je uvedeno v nařízení (EU) 2017/745.



Označení, že je k dispozici elektronický návod k použití. Návod lze získat na internetových stránkách www.phonak.com/myphonakapp.



Označuje katalogové číslo výrobce, podle kterého lze určit zdravotnický prostředek.



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Německo



Výrobce:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Švýcarsko
www.phonak.com

Distributor pro Českou republiku:

REJA spol. s r. o.
www.reja.cz
www.phonak.cz
www.sluchadla-deti.cz
www.komunikacnisystem.cz
www.audiodum.cz

V10.00/2025-01/NLG © 2021–2025 Sonova AG Všechna práva vyhrazena

Tato uživatelská příručka platí pro aplikaci myPhonak 7.1 a pozdější dílčí verze aplikace myPhonak 7.

Předchozí verzi uživatelské příručky k aplikaci si vyžádejte od místního zástupce nebo navštivte internetové stránky.

Chcete-li získat tištěnou kopii s návodem k použití, kontaktujte místního zástupce společnosti Sonova. Kopie vám bude zaslána do 7 dnů.

